

i-GEL

PL

Kwas fosforowy w żelu.

Opis:

i-GEL jest 37% żelem kwasu fosforowego, o dobrych właściwościach tiksotropowych i o optymalnej lepkości. Strzykawka z specjalnymi końcówkami pozwala na umieszczenie żelu w żądanym miejscu.

Instrukcja stosowania w 23°C:

Przygotuj powierzchnię w sposób tradycyjny. Jeśli zębina nie jest świeżo odkryta, oczyść wolną od oleju pastą profilaktyczną, taką jak i-FASTE. Załóż aplikator na strzykawkę. Wycisnij małą ilość żelu na podkładkę, a następnie delikatnie wyciskając tłoczek połóż warstwę wytrawiacza na wytrawianą powierzchnię. Pozostaw żel na 15 sekund, po czym spłucz wodą i wysusz. Sprawdź, czy wytrawiana powierzchnia jest sucha i czysta. Użyj wysokiej jakości bondu, takiego jak i-BONDING.

Ostrzeżenie: i-GEL zawiera kwas fosforowy. W przypadku kontaktu z tkanką, oczami, skórą lub innymi powierzchniami spłukać natychmiast dużą ilością wody. Nie używać żelem, jeżeli wiadomo, że pacjent ma alergię na którykolwiek ze składników.

Magazynowanie:

Przechowywać w dobrze zamkniętych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu. Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. Nie stosować po upływie daty ważności. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

Opakowania:

REF IGECF

Strzykawka 4,7 g, 5 końcówek.

REF IGE12B

Strzykawka 12 g, 10 końcówek.

REF IGE50B

Strzykawka 50 g + 2 puste strzykawki, 20 końcówek.

LT

Gelis ertmių ir paviršių ėsdinimui ir paruošimui.

Privalumai:

i-GEL tai 37% fosforo rūgštis, pasižyminti optimaliu takumu, kurios dėka gelis išlieka stabilus ant paviršiaus. Patogiu švirkštu, gelį galima lengvai užtepti ant bet kurios jums reikiamos vietos.

Naudojimas prie 23°C:

Paruoškite ertmę, kaip įprasta. Paviršius, kurie buvo paruošti seniau, rekomenduojame nuvalyti profilaktine pasta, neturintia alyvos, tokia kaip i-FASTE. Uždekite antgaliuką ant švirkšto. Išspauskite mažą kiekį gelio ant popierinio ar stiklinio paduko, kad priprastumėte prie švirkšto. Nesmarkiai spausdami švirkšto stūmoklį, užtepkite ploną gelio sluoksnį ant ėsdinamo paviršiaus. Palaukite 15 sekundžių kol rūgštis sureaguos. Nuplaukite vandens srove ir nudžiovinkite oru. Įsitinkinkite ar paviršius yra švarus ir sausas. Naudokite kokybiškas surišimo sistemas, tokias kaip i-BONDING.

Dėmesio:

i-GEL sudėtyje yra fosforo rūgšties. Jei gelis pateko į akis, ant burnos audinių ar kitų vietų, tuoj pat nuplaukite vandeniu. Nenaudokite gelio jei žinoma, kad pacientas alergiškas jo sudėtinėms dalims.

Laikymas:

Laikykite švirkštus gerai uždarytus, vėsioje ir sausoje vietoje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Nenaudokite pasibaigus galiojimo laikui. Saugokite nuo vaikų!

Pakuotė:

REF IGECF

4,7 g švirkštas, 5 antgaliukai.

REF IGE12B

12 g švirkštas, 10 antgaliukų.

REF IGE50B

50 g švirkštas, 2 tušti švirkštai, 20 antgaliukų.

Manufactured by/Производитель/Producent/Gamintojas:

i-dental

UAB „Medicinos linija“, Karaliaučiaus str. 29, LT-78374 Šiauliai, Lithuania.

Tel. +370 41 553 553, fax +370 41 553 551

dental@i-dental.lt, www.i-dental.lt