


Tyrimo juostelių įdėjimas

Po to, kai patvirtinama tyrimo juostelės partija, jūsų prašoma įdėti tyrimo juostelę.

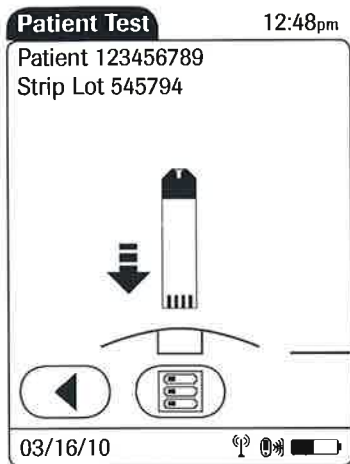

8.



- 1 Iš tyrimo juostelių indelio išimkite tyrimo juostelę ir vėl uždarykite indelio dangtelį.
- 2 Laikykite tyrimo juostelę taip, kad užrašas „ACCUCHEK“ būtų viršuje.
- 3 Stumkite tyrimo juostelę į tyrimo juostelių angą iki galo kryptimi, kuri nurodyta rodyklėmis ant tyrimo juostelės. Matavimo prietaisas supypsės.

10.



50 vnt.