

RAINBOW FLOW 6 X 1G



Šviesos kietinimo kompozitas vaikams.

Taikymas: Vaivorykštės srauto šviesos kompozitas skirtas vaikams. Būdingas mažas susitraukimas polimerizacija ir didelis stiprumas. Yra 6 ryškios ir linksmos spalvos, kurias pasirinko jauniausi pacientai.

Yra 6 x 1g (6 skirtingų spalvų: geltona, oranžinė, žalia, mėlyna, rožinė ir violetinė)

PRIEŠ PRADEDAMI NAUDOTI ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ

GAMINYS SKIRTAS NAUDOTI TIK GYDYTOJAMS ODONTOLOGAMS

SUDĖTIS: metakrilinės dervos (bis-GMA, UDMA, TGDMA), neorganinis užpildymas, pigmentai, fotoiniciatorius, inhibitorius.

PASKIRTIS

Šviesos kietėjimo kompozitas RAINBOW FLOW skirtas:

- tuštumų pieniniuose ir nuolatinuose dantyse užpildymui
- griovelių lakavimui
- šaknų kanalų žiočių ženklavimui

VARTOJIMO BŪDAS

Prieš pradedant procedūrą aplikatorių pamirkti spirite (etilo alkoholis), po to patalpinti švirkšte.

Tuštumų užpildymas, griovelių lakavimas:

Išvalius kariesą reikia aplikuoti rūgštį (pvz. BLUE ETCH pagalba), išskalauti ir nusausinti. Naudoti bond lipdančią sistemą. Ertmę užpildyti 2 mm kompozito sluoksniu, po to sukietinti šviečiant polimerizacine lempa per 10-15 sekundžių. Reikalui esant patepti dar vieną sluoksnį ir vėl sukietinti.

Kanalų žiočių ženklavimas:

Nuolatiniai užpildžius šaknų kanalą, kanalo žiotį patepti 2 mm kompozito sluoksniu ir sukietinti šviečiant polimerizacine lempa per 10-15 sekundžių. Ryški spalva padeda tiksliai rasti uždarytų kanalų žiotis sekančio vizito metu.

Kad išvengtų produkto švirkšte polimerizacijos, panaudojus preparatą iš karto ištraukti švirkšto stūmoklį ir uždaryti pakuotę originalaus dangtelio pagalba.

Produktas skirtas daugiakartiniam naudojimui, aplikatorius skirtas vienkartiniam naudojimui. Pakartotinas aplikatoriaus naudojimas gali sukelti antrinę infekciją.

KONTRAINDIKACIJOS

Nenaudoti gydant pacientus su padidėjusiu jautrumu ingredientams.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Nesukietintas preparatas gali dirginti odą ir akis. Kontakto atvėju gerai nuplauti dideliu vandens kiekiu ir kreiptis į gydytoją.

Nurijus, neverskite vėmimams. Gerti daug vandens. Kreiptis į gydytoją. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Dirbant su šiuo gaminiu naudoti koferdamą, apsauginius akinius ir apsaugines pirštines.

Įvykus rimtam, su gaminiu susijusiam incidentui, turėtų būti apie tai pranešta gamintojui ir Šalies, kurioje gyvena vartotojas ar pacientas, kompetentingai institucijai.

SANDĖLIAVIMAS

Laikyti originalioje pakuotėje iki 25°C temperatūroje.

Saugoti nuo saulės spindulių. Panaudojus sandariai uždaryti.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Tinkamumo naudoti laikas nurodytas ant pakuotės.

Atidarius pakuotę tinkamumo naudoti laikas nesikeičia su sąlyga, kad sandariai uždarysime preparatą po kiekvieno naudojimo.

PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

Tuščias pakuotes reikia sunaikinti arba grąžinti gamintojui.

PAKUOTĖ

Švirkštas su 1 g preparato, vienkartinį aplikatorių rinkinys.

Paskutinio atnaujinimo data: 01.04.2021/5

<https://youtu.be/dDe7MbGATSc>