

95mm

8mm

8mm

5mm

CE
0197

INFUSION SET / INFUZIJOS RINKINYS LUER LOCK

**Vienreiz lietojamā infūzijas sistēma
Infusioonisûsteem**



STERILE EO

Infuzijos rinkinys, skirtas
atlikti intraveninių tirpalų infuziją.
Sterilizuotas etileno oksidu.
Skirtas vienkartiniam naudojimui.



VARTOJIMO INSTRUKCIJA

- Užsukite lašėjimo greičio reguliatorių
- Įkiškite antgalį į konteinerį su skysčiu
- Atidarykite lašėjimo greičio reguliatorių ir, leisdami skysčiui tekėti, išleiskite orą iš sistemos
- Užsukite lašėjimo greičio reguliatorių
- Įveskite adatą į veną
- Sureguliuokite skysčio lašėjimo greitį
- 20 lašų destiliuoto vandens, išlašėjusio iš sistemos vamzdelio atitinka 1+/- 0,1 ml (1+/-0,1 g)
- Infuzijos rinkinį su oro įėjimo įtaisu rekomenduojama naudoti skysčių lašinimui iš nelankščių konteinerių
- Infuzijos rinkinį be oro įėjimo įtaisu rekomenduojama naudoti skysčių lašinimui iš lankščių konteinerių

ĮSPĖJIMAI

- atidžiai perskaitykite "Vartojimo instrukciją"
- nelieskite adatos
- rinkinys skirtas vienkartiniam naudojimui
- saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, labai žemų ar aukštų temperatūrų
- laikykite sausoje vietoje
- nenaudokite rinkinio, jei pakuotė pažeista, pažeisti atskirų dalių sujungimai, nukritęs apsauginis gaubtelis
- nenaudoti rinkinio kraujui ar kraujo komponentams

Infuzijos rinkinys yra sterilus, apirogniškas, netoksiškas.

Igaliotasis atstovas EB : SUNGO Certification Company Limited
RM101, MAPLE HOUSE, 118 HIGH STREET, PURLEY, LONDON, ENGLAND

NEEDLE SIZE: 21G



20181220



20181220



20231219



Zibo Eastmed Healthcare Products Co., Ltd
No.99 Lutai Road, Geoxin District, Zibo City, Shandong,
China



4 779021 409072 2



Importuotojas / Importētājs / Sisvevedaja: A. Zapalskio IĮ „AZAS“,
Tiekimo g. 2a, Panevėžys, Lietuva / Lietuva / Leedu. Tel./fax: +370 45 571361

Atidaryti čia | Atvērt šeit | Аварийно

210mm

30mm