

4L Dezinfekcinis indas su išimamu sieteliu ir vientisu dangčiu, DSS4215

Nesterilus sterilioms ir nesterilioms priemonėms dezinfekuoti skirtas rinkinys.



Warwick Grupės polipropileno produktai iš Warwick SASCo yra originalaus dizaino ir sukurti kaip alternatyva nerūdijančio plieno produktams, dažniausiai naudojamiems ligoninėse.

Šiuo metu ši produktų grupė yra plačiai naudojama sterilumo skyriuose, nukenksminimui, operacinėse ir klinikose, kaip mažai kainuojantys, efektyvus produkto dizaino ir daugkartinio naudojimo primonė ligoninių autoklavinėse.

Lengvai atpažįstamas dėl savo mėlynos spalvos, Warwick Range grupė susideda iš indelių, inkstų formos indelių, instrumentų dėklų, instrumentų apsaugos, instrumentų dėžių, atsekamųjų susegimų, paskirtymo ir matavimų indų, apimčiai ar instrumentų apruošimo konteinerių.



Produkto privalumai

- Skirtas instrumentų ir įrangos mirkymui, valymui, dezinfekcijai ir rankinei sterilizacijai;
- Gali būti naudojamas tiek sterilioms, tiek nesterilioms priemonėms dezinfekuoti.
- Stiprus ir ilgaamžis – konteineris atsparus dažniausiai ligoninėse naudojamoms valymo/dezinfekcijos priemonėms;
- Rekomenduojamas žemų temperatūrų sterilizacijai;
- Užapvalinti kraštais ir paviršiai eliminuoja popieriaus pažeidimus pakavimo ir sterilizacijos metu;
- Gali būti naudojamas valant Echokardiografiniams, Transvaginaliniams ultragarsams ir transrektaliniams ultragarsiniams zondams.

Produkto specifikacija

- 4 dalių dezinfekcinį rinkinį sudaro 4 litrų talpos indas, sietelis ir sandarus dangtis;
- 426mm x 156mm x 138mm;
- Pakuotės dydis 1 vnt.;
- Registruotas ir ženklinamas CE kaip 1 klasės medicinos prietaisais;
- Atitinka sekančius standartus:
ISO 9001:2008
 Kokybės valdymo sistema
ISO 13485:2003
 Medicinos direktyva – Kokybės Valdymo Sistema
ISO 17664:2004
 Sterilizuojami Medicinos prietaisai – Instrukcijos sterilizuojamų medicinos prietaisų apruošimui.
- Pagamintas iš aukštos kokybės polipropileno

Naudojimo instrukcija Warwick Sasco produkcijos

Valymas

- Produktą, prieš pirmą naudojimą, rekomenduojame išplauti;
- Šis produktas yra jautrus aukštoms temperatūros ir rekomenduojama sterilizuoti žemose temperatūrose. Rekomenduojame rankinę sterilizaciją su šaltu vandeniu ir aukšto lygio dezinfekcija. Naudojant abrazyvinius valiklius ar valymo/šveitimo priemones, gali būti pažeista produkto kokybė;

Laikymas

- Šis produktas turi 36 mėnesių nuo pagaminimo gamintojo garantiją, jeigu yra išlaikomos sandėliavimo sąlygos.
- Produktas turėtų būti sandėliuojamas jei įmanoma pirminėje pakuotėje, aukščiau nuo grindų ant palečių ar lentynų, gerai ventliuojamoj patalpoj laikantis 4 °C – 25 °C temperatūros režimo.