

„Omnistrip“ yra sterili juostelė žaizdos kraštams sukabinti, pagaminta iš odos spalvos neaustinės filjerinės poliamido medžiagos ir padengta lipniu hipoalerginiu poliakrilato sluoksniu.

## Indikacijos

„Omnistrip“ juostelės skirtos atraumatiškai nedidelėms žaizdoms ir chirurginiams pjūviams gyti pirminiu būdu. Naudojamos kartu su chirurginiais siūlais ar sąsagomis, juostelės suartina žaizdos kraštus ir sumažina tempimą, taip pat stabilizuoja randų formavimąsi išėjus siūlus ar sąsagas.

## Naudojimo būdas

1. Nuplėškite vidurinę juostelių odai sukabinti apsauginio popieriaus dalį.
2. Laikykite „Omnistrip“ juostelių kraštus už apsauginiu popieriumi uždengtų vietų, uždėkite ant žaizdos stačiu kampu pjūviui ir užspauskite. Juosteles taip pat galima užklijuoti po vieną.
3. Prispauskite juosteles ir vieną po kito nuplėškite išorinius apsauginius popierėlius.
4. Ant sąnarių ir kitų kūno dalių, kur pjūvio kraštai bus tempiami, rekomenduojama juosteles klijuoti įstrižai.

## Nuėmimas

Nuimdami „Omnistrip“ juosteles, patempkite už abiejų galų žaizdos vidurio link ir atsargiai kilstelėkite.

## Kontraindikacijos

„Omnistrip“ juostelės netinkamos naudoti antriniu būdu gyjančioms žaizdoms.

## Bendro pobūdžio nurodymai

**Turinys sterilus**, jei nepažeistos atplėšiamos pakuotės. Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje. Naudoti tik vieną kartą. Nesterilizuoti pakartotinai.

Tekstas peržiūrėtas 2012 m. birželio mėn.