

Alinity c

Creatinine Reagent Kit



en

Creatinine
07P99
G71243R02
B7P990

Revised October 2016.

REF 07P9920

REF 07P9930



Atidžiai laikykitės pakuotės lapelyje pateiktų nurodymų. Negalima užtikrinti tyrimo rezultatų patikimumo, jeigu nesilaikoma šiame pakuotės lapelyje pateiktų nurodymų.

PAVADINIMAS

Alinity c Kreatinino reagentų rinkinys

PASKIRTIS

Alinity c Kreatinino tyrimas skirtas kreatinino kiekybiniam matavimui žmogaus serume, plazmoje ar šlapime Alinity c analizatoriumi.

TYRIMO PRINCIPAS

Šarminėje pH terpėje mėginyje esantis kreatininas reaguoja su pikratu, susidaro kreatinino-pikrato kompleksas. Dėl komplekso susidarymo padidėjusi absorbcija 500 nm yra tiesiogiai proporcinga kreatinino koncentracijai mėginyje.

Metodas: Kinetinis šarminis pikrato

Daugiau informacijos apie sistemą  rimo technologiją pateikta Alinity ci-serijos naudojimo vadovo 3 skyriuje.

REAGENTAI

Reagentų rinkinys

Alinity c Kreatinino reagentų rinkinys 07P99.

PASTABA. Kai kurių dydžių rinkiniai nėra prieinami visose šalyse. Prašome kreiptis į vietos platintoją.

Lentelėje nurodyti tūriai (ml) rodo tūrį viename konteineryje.

REF	07P9920	07P9930
Testų kiekis konteineryje	300	1200
Konteinerių skaičius rinkinyje	10	10
Testų kiekis rinkinyje	3000	12 000
R1	11,2 ml	33,7 ml
R2	11,6 ml	36,4 ml