

# Alinity i

## Total PSA Reagent Kit



Total PSA  
07P92  
G71220R04  
B7P920

Read Highlighted Changes: Revised March 2018.

REF 07P9220

REF 07P9230



0843

Atidžiai laikykitės pakuotės lapelyje pateiktų nurodymų. Negalima užtikrinti tyrimo rezultatų patikimumo, jeigu nesilaikoma šiame pakuotės lapelyje pateiktų nurodymų.

**DĖMESIO.** Skirtingų gamintojų tyrimo metodais nustatyta bendro PSA koncentracija mėginyje gali skirtis dėl nevienodo tyrimo metodo ar reagentų specifiškumo. Laboratorija, išduodama rezultatus gydytojui, turi nurodyti, koku bendro PSA tyrimo metodu tirta. Skirtingais tyrimo metodais gautos reikšmės tarpusavyje nėra sukeičiamos. Jeigu paciento stebėjimo metu darant serijinius tyrimus pakeičiamas bendro PSA tyrimo metodas, reikia atlikti papildomus serijinius tyrimus naujuoju metodu. Prieš pakeisdama tyrimo metodą, laboratorija PRIVALO nustatyti stebimų pacientų koncentracijų bazinės reikšmės.

### PAVADINIMAS

Alinity i Bendro PSA reagentų rinkinys

### PASKIRTIS

Alinity i Bendro PSA tyrimas yra chemiluminescencijos mikrodalelių imunoanalizė (CMIA), skirta kiekybiniam bendro PSA (laisvo PSA ir PSA komplekso su alfa-1-antichimotripsinu) nustatymui žmogaus serume Alinity i analizatoriumi.

1. Kaip priemonė prostatos vėžiui aptikti, naudojant kartu su digitaliniu tiesiosios žarnos tyrimu (DTŽT) penkiasdešimties metų ir vyresniems vyrams. Vėžio diagnozei patvirtinti reikalinga prostatos biopsija.
2. Kaip papildomas tyrimas prostatos vėžiu sergančių pacientų valdymui.