

schülke -+



Specialus odontologinių siurbimo sistemų,
spjaudyklių ir žarnelių valiklis

aspirmatic® cleaner

Privalumai

- Be aldehydų
- Paprasta ir saugu naudoti
- Tinkamumas patvirtintas žinomiausių odontologinės įrangos gamintojų
- Tinka visų tipų amalgamos separatoriams
- Neputoja
- Ekonomiškas naudojimas

Dar paprasčiau apskaičiuoti reikalingą darbinio tirpalo koncentraciją galite naudodami skaičiuoklę *DosageCal*. Ją visada rasite internete arba svetainėje www.dosage-calculator-schuelke.com



Taikymo sritys

Odontologinių siurbimo sistemų, spjaudyklių ir siurbimo žarnelių specialiam valymui 1 ar 2 kartus per savaitę.

Naudojimo instrukcija

Reguliariai naudojant siurbimo įrenginį, organinių ir neorganinių medžiagų likučiai gali pridžiūti prie žarnelių sienelių ir jas užteršti bei sukelti infekcijos riziką filtrus keičiantiems darbuotojams.

Norint išvengti siurbimo sistemos mechaninių problemų ir tuo pačiu užtikrinti higieninę saugą, 5 % darbinis **aspirmatic® cleaner** tirpalas turėtų būti naudojamas specialiam valymui **vieną ar du kartus per savaitę vietoje vidurdienį atliekamos dezinfekcijos**. Kiekvienam įrenginiui paruoškite 2 litrus darbinio tirpalo **aspirmatic® dental** dozavimo inde. Sumaišykite 1900 ml vandens ir 100 ml koncentrato. Susiurbkite 1,5 litro per siurbimo žarneles, o likusį 0,5 litro supilkite į spjaudyklę. Palikite veikti apytiksliai 1 - 2 val. (pvz., per pietų pertrauką), kad ištirtų susikaupę nešvarumai. Praėjus poveikio laikui, prasiurbkite sistemą švariu vandeniu, kad iš žarnelių pasišalintų atitirpę nešvarumai. Jei sistema stipriai užteršta ar buvo ilgai nenaudojama, reikėtų paruošti 10% darbinį **aspirmatic® cleaner** tirpalą (1800 ml vandens ir 200 ml koncentrato). **Svarbu! aspirmatic® cleaner** neturėtų būti paliekamas siurbimo sistemoje per naktį ar savaitgaliiui.

aspirmatic® dental dozavimo indas leidžia lengvai ir saugiai sumaišyti ir vėliau išpilti darbinį tirpalą. Siurbimo žarneles galima lengvai prijungti prie adapterio. Esant dideliame užteršimui krauju, sistemą reikia prasiurbti vandeniu iš karto po procedūros.



Produkto informacija

Sudėtis:
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 648/2004:
5% nejoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos.

Fizikinės cheminės savybės

Spalva	Geltona
Tankis	Apie 1,17 g/cm ³ / 20 °C
Pliūpsnio temperatūra	> 100 °C / Metodas: ISO 2719
Forma	Skystis
pH	Apie 0,9 / 20 °C / koncentratas
Dinaminė klampa	Nėra duomenų

Specialistų nuomonė ir informacija

Norėdami peržiūrėti visus pasiekiamus literatūros šaltinius ar ataskaitas, susijusias su produktu, apsilankykite mūsų interneto svetainėje: www.schuelke.com.

Konkrečiais klausimais kreipkitės klientų aptarnavimo tarnybos telefonu +49 40 52100-666, el. paštu info@schuelke.com

Specialieji nurodymai

Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą. Darbo saugos reikalavimai numato, kad asmenys, dirbantys su dezinfekcijos priemonėmis, neskirtomis naudoti ant odos, turi mūvėti apsaugines pirštines. Nemaišyti **aspirmatic®** ir **aspirmatic® cleaner** koncentratų ir darbinių tirpalų. Nenaudoti priemonės pasibaigus galiojimo laikui.

Užsakymo informacija

Prekė	Pristatymo forma	Prekės Nr.
aspirmatic® cleaner 2 l buteliukas	5 vnt. dėžutėje	Paprašius

Šie produktai parduodami ne kiekvienoje šalyje. Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su vietos dukterine įmone ar platintojais.

Pagalbinės naudojimo priemonės

Pagalbinės naudojimo priemonės	Prekės Nr.
Matavimo indelis 500 ml	136101
Matavimo indelis 50 ml	136102

Susiję produktai

- **aspirmatic®**
- **schülke dental** pagalbinė naudojimo priemonė

Aplinkosauginė informacija

schülke produktus gamina ekonomišką būdą ir taikydama modernius, saugius bei aplinkai nekenksmingus gamybos procesus, tuo pačiu užtikrindama, kad produktai atitiktų aukštus kokybės standartus.



Schülke & Mayr GmbH gamybos leidimas suteiktas vadovaujantis Vokietijos Vaistų įstatymo 13 skirsnio 1 dalimi ir GMP sertifikatais, taikomais vaistams.

Gamintojas:
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Vokietija
Telefonas +49 40 - 52100 - 0
Faksas +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com



Igaliojasis atstovas Lietuvoje:
„Sanovus“, UAB
Daugėliškio g. 32-301
LT-09300 Vilnius, Lietuva
Telefonas +370 5 2450 415
Faksas +370 5 2706 201
info@sanovus.lt

Stomatologinių siurblių valymo preparatas Be aldehydų



Aspirmatic® Cleaner

Sudėtis

Veiklioji medžiaga: organinė rūgštis, kurios sudėtyje yra 30-50% citrinos rūgšties monohidrato.

Kitos sudedamosios dalys: nejoniniai tenzidai, korozijos inhibitoriai, dažai.

Savybės

Skaidrus, bekvapis geltonos spalvos skystis. Koncentrato pH – 0,9. Tirpalai neputoja. Valiklis papildo Aspirmatic® dezinfektantą.

Paskirtis

Stomatologiniams siurbliams (seilių nusiurbimo sistemai ir spjaudyklei) valyti. Tinka stomatologiniams siurbliams su amalgamo separatoriais. Galima taikyti visai gydymo aparatūrai (pvz., Sirona, Kavo, Castellini ir kt.).

Naudojimas

Tirpalai ruošiami naudojantis S&M kamščiu – dozatoriumi 2 litrų talpos buteliams. 5% tirpalas ruošiamas 2 l talpos inde (1900 ml vandens ir 100 ml koncentrato – 5 kartus apversti butelį). Apie 1,5 litro reikėtų prasiurbti lanksčiomis žarnomis, o likusius 0,5 litro įpilti į spjaudyklę. Jeigu siurbimo sistema labai užteršta, rekomenduojama naudoti 10% tirpalą. Aspirmatic® Cleaner ekspozicijos laikas – 2 val. Po to būtina siurbimo sistemą praskalauti vandeniu, kad pašalintų atitirpę nešvarumai. Siurbliai valomi vieną arba du kartus per savaitę vietoje Aspirmatic® dezinfektanto (per pietų pertrauką arba darbo dienos pabaigoje; valiklio negalima palikti nakčiai).

Priedai dozavimui palengvinti: 2 l butelio dozatorius; Aspirmatic® sistema (apie 0,5 l paruošto naudoti tirpalo automatiškai lieka sistemoje).

Ypatingi nurodymai. Negalima maišyti nei Aspirmatic® ir Aspirmatis® Cleaner koncentratų, nei paruoštų tirpalų.

Darbų saugos nurodymai

Koncentratas dirginantis. Dirbdami naudokite apsauginius akinius ir pirštines. Jei pateko į akis, ar ant odos – nedelsiant gausiai praplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Jei nurijote – kreipkitės į gydytoją. Saugokite nuo vaikų!

Saugojimas

Laikykite sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje. Nelaikykite arti maisto produktų. Saugokite nuo šaltio ir tiesioginių saulės spindulių

Pakuotės

2 litrų polietileno buteliai