
	Teigiamas rezultatas: Abi taršos medžiagos visiškai nuplautos.
	Rezultatas: Polisacharininė taršos medžiaga nuplauta visiškai, bet matomas fibrino likutis Testas rodo: Nepakankami baltymus tirpdantys plovimo parametrai Optimizavimas: Patikrinti ir/arba pataisyti: Plovimo laiką/temperatūrą/ploviklio veiksmingumą, ploviklio dozavimą
	Rezultatas: Kraujo taršos medžiaga visiškai nuplauta, bet matomi polisacharidų likučiai. Testas rodo: Neoptimalūs polisacharidus tirpdantys parametrai Optimizavimas: Patikrinti ir/arba pataisyti: Vandens kokybę/ ploviklio veiksmingumą ir dozavimą /Plovimo temperatūrą ir laiką.
	Rezultatas: Polisacharininė taršos medžiaga nuplauta visiškai, bet matomas raudonas baltymo likutis. Testas rodo: Įvyko baltymo denatūracija (dėl temperatūros arba dezinfekcuojančios medžiagos) Optimizavimas: Patikrinkite, ar plovimo metu nenaudojamas dezinfekantas ir ar ne per aukšta plovimo temperatūra. Jei įmanoma, naudokite pradinį skalavimą šaltu vandeniu.
	Rezultatas: Visiškai nuplautos abi taršos medžiagos. Testas rodo: Nėra srovės/Nėra valomojo poveikio. Optimizavimas: Patikrinti, ar gerai prijungtas FlexiCheck prietaisas, patikrinti mašiną ir plovimo programą.

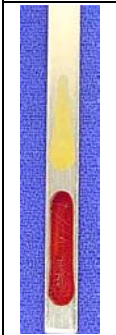

PEREG GMBH
PORSCHESTRASSE 12
D-84478 WALDKRAIBURG
TELEFON (0 86 38) 8 41 95
TELEFAX (0 86 38) 8 41 62
E-MAIL pereg@t-online.de
<http://www.pereg.de>

Atitikties deklaracija EN ISO 15883-5 2021

PEREG GmbH valymo indikatoriai su standartizuota taršos medžiaga:

TOSI®, TOSI®-LumCheck and TOSI®-FlexiCheck

TOSI®, TOSI®-LumCheck ir TOSI®-FlexiCheck yra pagrįsti dviejų komponentų kraujo taršos medžiaga, nurodyta EN ISO 15883-5 (A priedo A 1 lentelė), siekiant patikrinti valymo veiksmingumą, kad jis atitiktų reikalavimus (4.2 Apsvarstymai dėl taršos medžiagos).

Standartizuoti PEREG valymo indikatoriai yra sukurti taip, kad būtų galima vizualiai įvertinti ir nebūtina stabdyti plovimo ir dezinfekcijos mašinos ciklo prieš dezinfekavimo ar džiovinimo etapus.

PASTABA: Pagal EN ISO 15883-5 valymo efektyvumo bandymai atliekami kartu su instrumentų įkrova.

PEREG GmbH

Martin Pfeifer
Managing Director

PEREG GMBH
PORSCHESTRASSE 12
34478 WALDKRAIBURG
TELEFON (0 86 38) 8 41 00
TELEFAX (0 86 38) 8 41 62

January 2022



PEREG GMBH
PORSCHESTRASSE 12
D-84478 WALDKRAIBURG
TELEFON (0 86 38) 8 41 95
TELEFAX (0 86 38) 8 41 62
E-MAIL pereg@t-online.de
<http://www.pereg.de>

Declaration of conformity EN ISO 15883-5 2021

PEREG GmbH Cleaning Indicators with standardised test soil:

TOSI[®], TOSI[®]-LumCheck and TOSI[®]-FlexiCheck

TOSI[®], TOSI[®]-LumCheck and TOSI[®]-FlexiCheck are based on the two component blood test soil outlined in EN ISO 15883-5 (ANNEX A Table A1) for testing of the cleaning efficacy to meet the requirements (4.2 Test soil considerations).

The standardised PEREG cleaning indicators are produced to enable visual evaluation and it is not necessary to operate the WD without the disinfection or drying stage.

NOTE: According to EN ISO 15883-5 testing of cleaning efficacy is performed including the instrument load.

PEREG GmbH

Mar
Managing Director

PEREG GMBH
PORSCHESTRASSE 12
D-84478 WALDKRAIBURG
TELEFON (0 86 38) 8 41 00
TELEFAX (0 86 38) 8 41 62

January 2022