


Rutiniam plovimo vertinimui ir plovimo procedūros patvirtinimui automatinėse endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašinose, pagal EN ISO 15883



- Testas paruoštas naudojimui. Skirtas endoskopų plovimo kokybei vertinti.
- Skirtingos taršos: fibrinas, hemoglobinas ir polisacharidai.
- Išardomas įtaisas imituojantis endoskopą su Luer Lock jungtimi.
(1 m ilgio silikoninė žarnelė, kapsulė iš dviejų dalių sujungiama sriegiu)
- Pakuotėje 25 vnt.
Prekės kodas 20240-25


FlexiCheck sistema tai unikalus produktas, tikrinantis lanksčių endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašinas. Lankstūs endoskopai dažniausiai užteršiami gleivėmis, tačiau neretai pasitaiko ir kraujo. TOSI-FlexiCheck testas turi dvi skirtingas taršas. Viena – tai standartizuotas fibrinas ir hemoglobinas, ir kita – polisacharidų mišinys. TOSI-FlexiCheck vienu metu tikrina endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašinos ir ploviklio efektyvumą.

Vertinimas

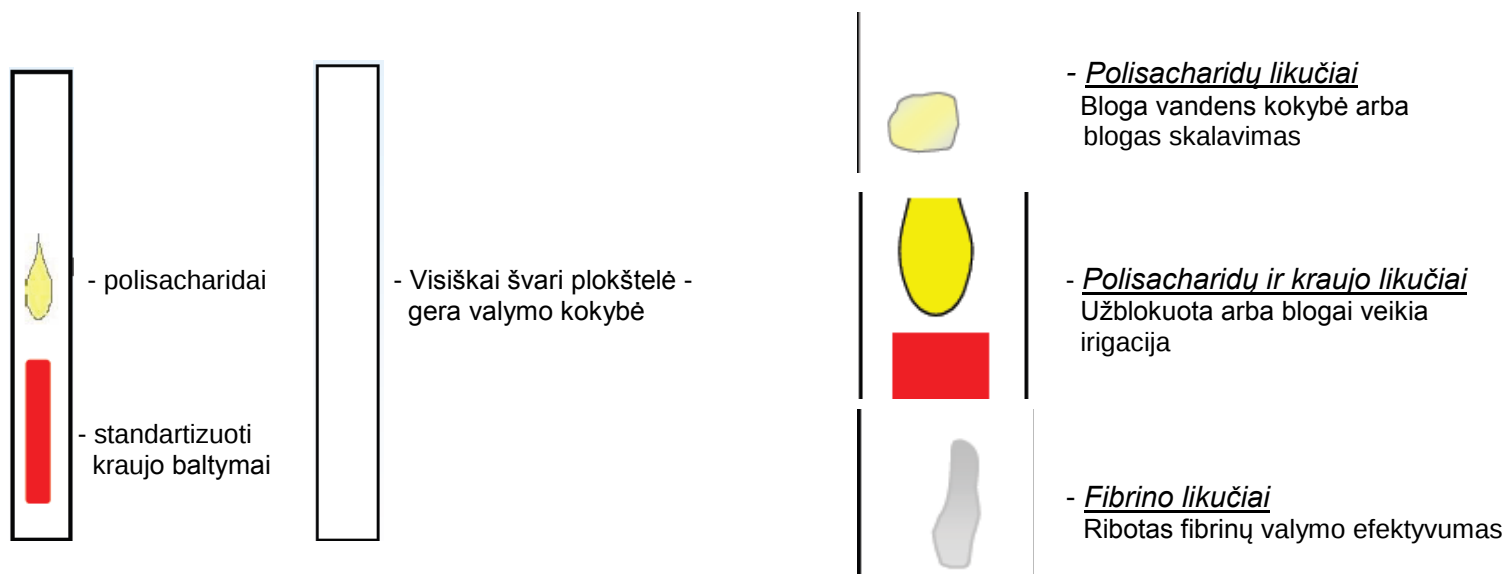

TOSI® - FlexiCheck

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

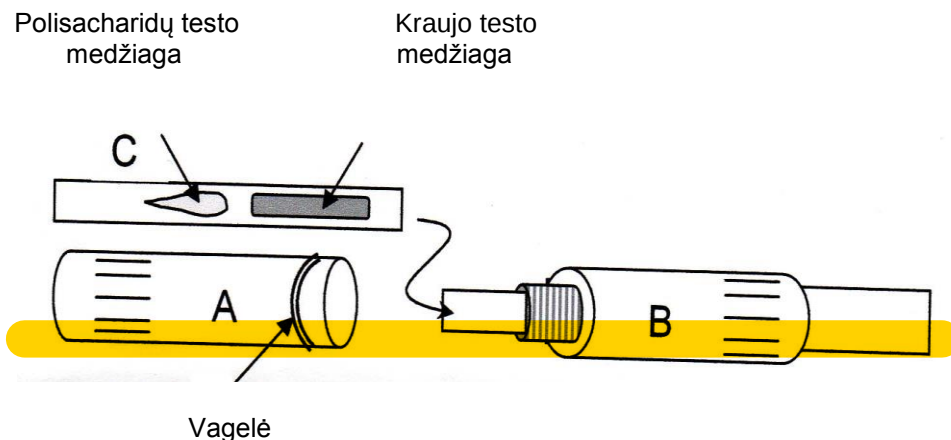

1. Nusukamosios FlexiCheck-dalys: atskiriamoji A-dalis (su pažymėtu tarpu) , atsiskirianti nuo B dalies.
2. Atidarykite apsauginį TOSI® - FlexiCheck įpakavimą ir įdėkite testo juostelę (C dalis) į B dalį (kaip parodyta paveikslėlyje). Nelieskite testo medžiaga padengtos juostelės vietos.
3. Vėl uždarykite FlexiCheck prietaisą.
4. Sujunkite FlexiCheck dalį su vienu iš plautuvės plovimo sistemos kanalų (Luer-lock) ir pradėkite plovimo ciklą pagal nustatytą plovimo dezinfekcijos mašinos programą.
5. Atidarykite prietaisą pasibaigus plovimo programai: atskirkite A dalį nuo B dalies ir išimkite TOSI® -FlexiCheck testo juostelę. Nelieskite testo medžiaga padengtos juostelės vietos.
6. Vizualiniam rezultato įvertinimui naudokite TOSI Flexi-Check vertinimo lentelę

Laikymo sąlygos:

- Laikyti originalioje apsauginėje pakuotėje TOSI® - FlexiCheck.dėžutėje esant 2-25°C temperatūrai.
- Neatidarinėkite TOSI® - FlexiCheck apsauginės pakuotės iš anksto prieš naudojimą.
- Tinkamumo naudoti laikas: žr. ant įpakavimo.

Vienoje dėžutėje yra 25 testo juostelės.

Pardavimo atstovas Lietuvoje:
UAB "APITERAPIJA"
Daugėlišio g. 32-301, LT-09300 Vilnius, Lietuva
Tel.: 8 5 2450 415, faksas: 8 5 2706 201
El. p. adresas: info@apiterapija.lt

Gamintojas:
PEREG GMBH
Porschestr. 12
D-84478 Waldkraiburg
Germany

	Teigiamas rezultatas: Abi taršos medžiagos visiškai nuplautos.
	Rezultatas: Polisacharininė taršos medžiaga nuplauta visiškai, bet matomas fibrino likutis Testas rodo: Nepakankami baltymus tirpdantys plovimo parametrai Optimizavimas: Patikrinti ir/arba pataisyti: Plovimo laiką/temperatūrą/ploviklio veiksmingumą, ploviklio dozavimą
	Rezultatas: Kraujo taršos medžiaga visiškai nuplauta, bet matomi polisacharidų likučiai. Testas rodo: Neoptimalūs polisacharidus tirpdantys parametrai Optimizavimas: Patikrinti ir/arba pataisyti: Vandens kokybę/ ploviklio veiksmingumą ir dozavimą /Plovimo temperatūrą ir laiką.
	Rezultatas: Polisacharininė taršos medžiaga nuplauta visiškai, bet matomas raudonas baltymo likutis. Testas rodo: Įvyko baltymo denatūracija (dėl temperatūros arba dezinfekcuojančios medžiagos) Optimizavimas: Patikrinkite, ar plovimo metu nenaudojamas dezinfekantas ir ar ne per aukšta plovimo temperatūra. Jei įmanoma, naudokite pradinį skalavimą šaltu vandeniu.
	Rezultatas: Visiškai nuplautos abi taršos medžiagos. Testas rodo: Nėra srovės/Nėra valomojo poveikio. Optimizavimas: Patikrinti, ar gerai prijungtas FlexiCheck prietaisas, patikrinti mašiną ir plovimo programą.