

Incidin® OxyFoam S & OxyWipe S


Sporicidinis paruoštas naudojimui valiklis-dezinfektantas su Hi-speed H₂O₂™

Naujoviška formulė Incidin OxyFoam S & Incidin OXY servetėlės suteikia patentuoto vandenilio peroksido tirpalo su plataus spektro veiksmingumą naudą

Jie yra veiksmingi prieš daugelį bakterijų ir virusų ir nepalieka jokių aktyvių likučių dėl jų greitos garavimo spartos.

Incidin OxyFoam S ir OxyWipe S suteikia:

- * Pirmos sporicidinės ir virucidinės servetėlės visiems paviršiams
- * Hi-speed H₂O₂™
- * EN 16615 atitikimas
- * Nėra pavojingumo ženklinimo (acc. CLP) - nėra PPE
- * Puikus medžiagų suderinamumas

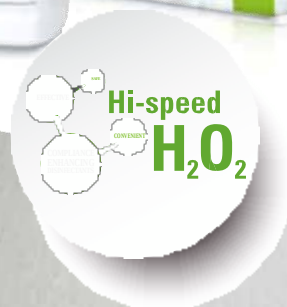

Incidin® OxyFoam S & OxyWipe S

Sporicidinis paruoštas naudojimui valiklis-dezinfektantas su Hi-speed H₂O₂™

3
MIN²

Sporicidinis
prieš *C. difficile*

2
MIN²

Virucidinis
(CLEAN CONDITIONS)

1
MIN²


Bactericidinis
(EN 13727 / 16615)

Savybės: Efektyvu, saugu ir patogiu	Naudos
EFFECTIVE	Platus veiksmingumo spektras Trumpas kontaktinis laikas
SAFE	Nėra pavojingumo ženklinimo (acc. CLP) Nereikalingos asmeninės apsaugos (PPE) ¹
CONVENIENT	Valo ir dezinfekuoja vienu etapu Puikus medžiagų suderinamumas



MICROBIOLOGINIAI IR SEROLOGINIAI TYRIMŲ REZULTATAI

EFEKTYVUMAS NESKIESTO	OxyFoam S Kontaktinis laikas	OxyWipe S Kontaktinis laikas
Paviršių dezinfekavimas pagal 2015 m. VAH metodu (įskaitant EN 16615)		
Baktericidinis, mielesticidinis	5 min	15 min
Fungicidiniai	5 min	30 min
Mykobaktericidinis	15 min	30 min
Patikrinta pagal RKI rekomendaciją 01/2004* (nešvarios sąlygos)		
Veiksmingas prieš apsisaugotus virusus pagal RKI rekomendacijai 01/2004	15 sec	30 sec
Adeno*	30 sec	1 min
Polyoma SV40*	30 sec	30 sec
Rota*		
EN 13727 (baktericidinis)		
EN 13624 (mielesticidinis)	1 min	2 min
EN 13624 (fungicidinis)	1 min	15 min
EN 13624 (fungicidinis)	5 min	30 min
EN 14348 (tuberculocidinis, mikobaktericidinis)	5 min	30 min
EN 14476 (virucidinis)	2 min** / 30 min	30 min**
EN 14476 Adeno	30 sec	30 sec
EN 14476 Noro	1 min	15 min
EN 13704 (sporidinal)**	30 min	60 min
EN 13704 (<i>C. difficile</i>)**	3 min	15 min
Euro-Norms (dirty conditions) - 4-field-test		
EN 16615 (bactericidal)	1 min	2 min
EN 16615 (yeasticidal)	1 min	1 min
EN 16615 (fungicidal)	5 min	5 min
EN 16615 (tuberculocidal, mycobactericidal)	5 min	5 min
Sporicidal (method EN 16615)**	15 min	30 min
<i>C. difficile</i> (method EN 16615)**	5 min	5 min

INCIDIN OXYFOAM S NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

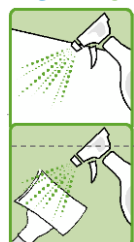

- 1 Purškite ant paviršiaus atstumu 30 cm
- 2 Nuvalykite paviršių, kad jis būtų visiškai šlapias
- Leiskite išdžiūti

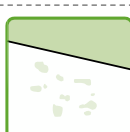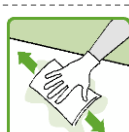

- 1 Purškite ant švarios servetėlės
- 2 Nušluostyti paviršių, kad būtų visiškai šlapias
- Leiskite išdžiūti

EUROPEAN HEADQUARTERS:

ECOLAB EUROPE GMBH

Richtistrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
+41 (0) 44 877 2001

www.ecolab.com



ECOLAB

DEUTSCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany
+49 (0) 2173 599 0

www.de.ecolab.eu



0297

EFEKTYVU. SAUGU. PATOGU.

TAIKYMO SRITYS

Incidin OxyFoam S:

Valymo ir dezinfekavimo
purškiamos putos,
paviršiams (įsk.zondus)
ir inventoriui.



BIOZID N-12164

Incidin OxyWipe S:

Valymo ir dezinfekavimo
servtelės paviršiams
(įsk.zondus) ir inventoriui.

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

Incidin OxyFoam S: Spray surface from
ca. 30 cm arba ant švarios serv.
Nuvalykite paviršių, kad jis būtų

Visiškai šlapias. Arba panaudokite neskiestą
produktą ant švarios servetėlės, išvalykite paviršių ir
leiskite išdžiūti.

Incidin OxyWipe S: Paimkite servetėlę.
Nuvalykite kruoščiai visą paviršių.

Leiskite išdžiūti ir nenuplaukite. Užtikrinkite
kontaktą su visu paviršiumi. Uždarykite
dangtelį po naudojimo. Neskirta invazinių
med.prietaisų dezinfekcijai. Nenaudokite
paviršiui, kuris jautriai reaguoja į oksidacinius
priedus, tokius kaip marmuras, varis ar žalvaris.

INGRIDIENTAI

100g yra: Incidin OxyFoam S: 1.5g
vandenilio peroksido. Incidin
OxyWipe S: 1.0g vandenilio peroksido.

PAKAVIMO IR UŽSAKYMO INFORMACIJA

PRODUKTAS	DYDŽI AI	KODAS
Incidin OxyFoam S	6 x 750ml	3082060
Incidin OxyWipe S	6 x 100	3082240

LAIKYMAS

Produktas turi būti saugomas
originalioje pakuotėje, žemesnėje nei
25°C vėsiroje, sausoje patalpoje, vengiant
tiesioginių saulės spindulių.
Galiojimas po pirmo pakuotės atidarymo:
Incidin OxyFoam S: iki galiojimo datos,
nurodytos ant pakuotės
Incidin OxyWipe S: 1 mėnesis

