

# PAUL

Naudojimo instrukcija

Lietuvių



## **Turinys**

1.	Mielas vartotojau, .....	3
2.	Saugumo informacija .....	4
3.	Produkto apžvalga .....	5
4.	Eksplotacija .....	6
5.	Priežiūra ir valymas .....	7
6.	Techniniai duomenys .....	8

## **1. Mielas vartotojau,**

Dėkojame, kad įsigijote darbo kėdę Sirona PAUL.

Pateikiama techninė dokumentacija yra produkto dalis. Jūs visuomet turėtumėte laikyti šią dokumentaciją pasiekiamą.

Šios naudojimo instrukcijos parodo įvairius darbo kėdės modelius.

Priežiūra ir valymas turėtų būti atliekami remiantis atitinkamomis instrukcijomis.

Būtina laikytis visos saugumo informacijos, kad išvengti asmeninių sužalojimų ir materialinės žalos.

Jūsų Sirona komanda

## **2. Saugumo informacija**

### **Įrenginio modifikavimas**

Šio įrenginio modifikacijos, kurios galėtų įtakoti naudotojo, pacientų ar trečiųjų šalių saugumą, yra draudžiamos įstatymo!

### **Priedai**

Tam, kad užtikrinti produkto saugumą, šis įrenginys turi būti naudojamas tik su originaliais Sirona priedais arba trečiųjų šalių priedais specialiai patvirtintais Sirona. Vartotojas prisiima riziką naudodamas nepatvirtintus priedus.

### **Apkrova**

Prašome laikytis 135 kg maksimalios darbo kėdės apkrovos.



### 3. **Produkto apžvalga**

#### **PAUL**

- Aukščio reguliavimas su rankiniu paleidimu
- Žiedas kojoms (papildomas)



## 4. Eksploatacija

### 4.1 Aukščio reguliavimas su rankiniu paleidimu



Valdymo svirtis, skirta rankiniam nuleidimui **randasi po sėdyne.**

- **Pakėlimas**


Kiek įmanoma pakelkite savo svorį nuo sėdynės ir patraukite valdymo svirtį į viršų.

- **Nuleidimas**

Palikite savo svorį ant sėdynės ir patraukite valdymo svirtį į viršų.

### 4.2 Atrama

Atrama gali būti pasukama  $\pm 45^\circ$ .

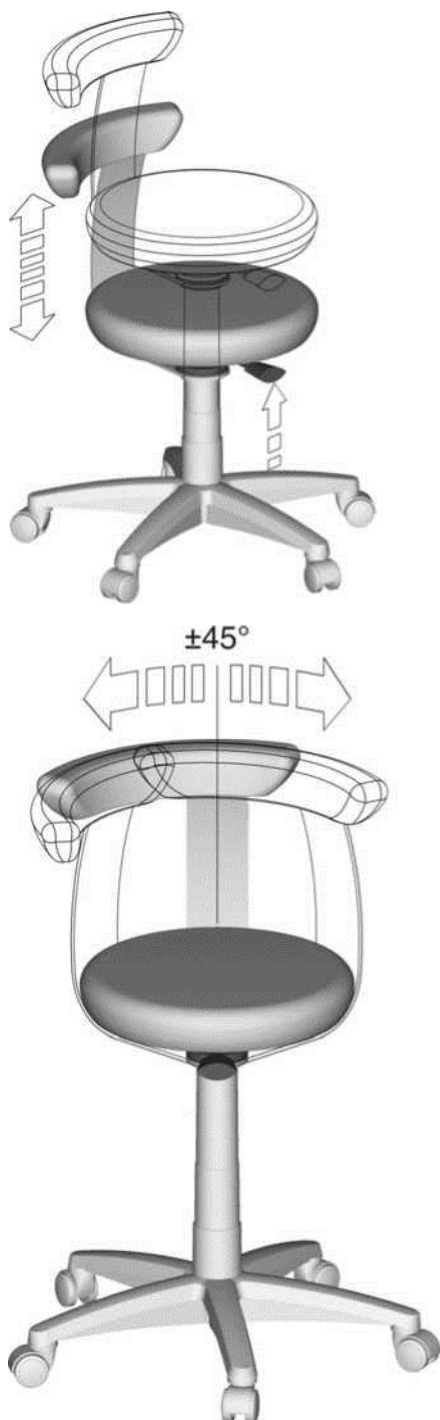

## 5. Priežiūra ir valymas

### 5.1 Priežiūros ir valymo priemonės

#### PASTABA

**Patvirtintos priežiūros ir valymo priemonės**

**Naudokite tik Sirona patvirtintas priežiūros ir valymo priemones!**

Nuolat atnaujinamą patvirtintų priemonių sąrašą galite atsisiųsti internetu iš:

"www.sirona.com" / "SERVICE" / "Care and cleaning" / "Care and cleaning agents"

Jei neturite prieigos prie interneto, Jūs galite užsisakyti sąrašą iš savo medžiagų tiekėjo.

Užsakymo numeris: **59 70 905**

### 5.2 Priežiūra ir valymas

- **Dezinfekcija**

Paviršiai gali būti purškiami arba valomi paviršių dezinfektantais

- **Valymas**

Reguliariai pašalinkite purvą, nešvarumus ir dezinfektantų liekanas, naudodami silpnas valymo priemones.

- **Apmušalai**

Apmušalams naudokite tik priežiūros ir valymo priemones patvirtintas Sirona, žiūrėti „Priežiūros ir valymo priemonės“.

- **Apsauga nuo medikamentų**

Dėl aukštos koncentracijos ir sudėtyje esančių medžiagų, daugelis medikamentų gali ištirpdyti, išėsti, nubalinti ar išblukinti paviršius. Vienintelis žalos išvengimo būdas yra nedelsiant nuvalyti medikamentus drėgnu audiniu ir valymo priemone.

- **Ratukai**

Reguliariais intervalais valykite darbo kėdės ratukus, kad išvengtumėte žalos grindims.



## 6. Techniniai duomenys

	Matmenys milimetrais
<b>A</b> Sėdynės aukštis (atitinka DIN, apkrauta) Pneumatinė spyruoklė, trumpa Pneumatinė spyruoklė, ilga	405 – 520 505 – 625
<b>B</b> Bendras aukštis (žemiausioje pozicijoje, neapkrauta) Pneumatinė spyruoklė, trumpa Pneumatinė spyruoklė, ilga	705 805
<b>C</b> Sėdynės plotis	Ø400
<b>D</b> Žvaigždės pagrindas	Ø600
<b>E</b> Bendras gylis (išskyrus žiedą kojoms)	465
<b>F</b> Sėdynės gylis (atitinka DIN, nugaros įlinkimo vietoje)	385
<b>G</b> Atramos aukštis	265
<b>H</b> Atramos plotis	407
<b>J</b> Žiedas kojoms	Ø508

### Bendras svoris

10,0 – 12,0 kg – tinkama asmenims, sveriantiems iki 135 kg

