

**GLUKÓZOVÁ ELEKTRODA E6006**
**CZ**

**Použití:** Je určena pro analyzátory EML105/ABL555 a ABL SYSTEM 6xx Series.

**Před použitím:**

1. Vybalte elektrodu  
*Nedotýkejte se hrotu elektrody.*
2. Opatřete ihned elektrodu membránou.
3. Před zasunutím do analyzátoru osušte kontakt elektrody.

**ELEKTRODA GLUKOZOWA E6006**
**PL**

**Zastosowanie:** Używana z analizatorami EML105/ABL555 oraz serii ABL SYSTEM 6xx.

**Przed użyciem:**

1. Rozpakuj nową elektrodę.  
*Nie dotykać końcówki elektrody.*
2. Niezwłocznie załóż na elektrodę membranę.
3. Osusz styki elektrody przed zamontowaniem jej w analizatorze.

**GLÜKOOSI ELEKTROOD E6006**
**EE**

**Kasutus:** EML105/ABL555 ja ABL SYSTEM 6xx seeria analüsaatorid.

**Enne kasutamist:**

1. Eemalda uus elektrood plastikkotist.  
*Ära puutu elektroodi otsa!*
2. Paigalda elektroodile membraan.
3. Enne elektroodi paigaldamist analüsaatorisse kuivata elektroodi elektrikontaktid.

**GLIUKOZĖS ELEKTRODAS E6006**
**LT**

**Paskirtis:** naudojamas EML105/ABL555 ir ABL SISTEMOS 6xx serijos analizatoriuose.

**Prieš naudojimą:**

1. Išpakuokite naują elektrodą.  
*Nelieskite elektrodo galiuko.*
2. Tuojau pat uždėkite membraną ant elektrodo.
3. Prieš įdėdami elektrodą į analizatorių, nusauskite elektrodą kontaktą.

**GLIKOZES ELEKTRODS E6006**
**LV**

**Lietošana:** lieto EML105/ABL555 analizatoros un ABL SYSTEM 6xx sērijās.

**Pirms lietošanas:**

1. Izsaņiņojiet jauno elektrodu.  
*Nepieskarieties elektroda galam.*
2. Nekavējoties uzlieciet elektrodām membrānu.
3. Pirms elektroda iemontēšanas analizatorā nosusiniet elektroda kontaktu.

**GLÜKÓZ ELEKTRODA E6006**
**HU**

**Használat:** EML105/ABL555 és ABL SYSTEM 6xx sorozatú analízátorokban használható.

**Használat előtt:**

1. Csomagolja ki az elektródát.  
*Ne fogja meg az elektróda csúcsát.*
2. Membránossa meg az elektródát.
3. Törölje szárazra az elektróda felső csatlakozóját mielőtt az analízátorba visszatenné.

**GLUKÓZOVÁ ELEKTRODA E6006**
**SK**

**Použitie:** používa sa v analyzátoroch EML105/ABL555 a v sériách ABL SYSTEM 6xx.

**Pred použitím:**

1. Rozbalte elektródu.  
*Nedotýkajte sa konca elektródy.*
2. Hneď nasadte membránu na elektródu.
3. Pred vsadením elektródy do analyzátoru vysušte jej kontakt.



