

Wide Range C-Reactive Protein Calibrators wr CRP CAL

REF	Turinys	
00337402 (B03-4815-01)	6 buteliukai su kalibravimo medžiagomis	
	wrCRP CAL 1	1 x 1 ml wr CRP CAL 1
	wrCRP CAL 2	1 x 1 ml wr CRP CAL 2
	wrCRP CAL 3	1 x 1 ml wr CRP CAL 3
	wrCRP CAL 4	1 x 1 ml wr CRP CAL 4
	wrCRP CAL 5	1 x 1 ml wr CRP CAL 5
	wrCRP CAL 6	1 x 1 ml wr CRP CAL 6

Paskirtis

In vitro diagnostikos tikslais kalibruojant ADVIA® Chemistry sistemose plataus spektro C-Reactive Protein (wrCRP) metodui.

Kalibravimo medžiagos aprašas

Kiekis	1 ml/buteliuke	
Sudedamosios dalys	Žmogaus fermentas CRP stabilizuoto baltymo terpėje; natrio azidas 0,1%	
Laikymas	2–8°C	
Savybių pastovumas	Neatidarius:	iki buteliuko etiketėje nurodytos galiojimo pabaigos datos
	Atidarius:	28 dienas (uždengus dangteliu ir laikant 2–8°C temperatūroje)

**DĖMESIO! GALIMAS BIOLOGINIS PAVOJUS**

Sudėtyje yra žmogiškosios kilmės medžiagų. Nors kiekvienas žmogaus serumo arba plazmos donoro vienetas, naudotas gaminant šį produktą, buvo tirtas FDA-patvirtintais metodais ir nustatyta, kad nėra reaktyvaus hepatito B paviršiaus antigeno (HBsAg), antikūnų hepatitui C (HCV) ir antikūno HIV-1/2, visi produktai, naudoti gaminant žmogiškosios kilmės medžiagas, turėtų būti laikomi potencialiai užkrečiamais. Kadangi jokie tyrimų metodai negali visiškai užtikrinti, kad nėra hepatito B arba C virusų, HIV arba kitų infekcinių agentų, šiuos produktus reikia naudoti laikantis nustatytų geros laboratorinės praktikos reikalavimų.

Skirta *in vitro* diagnostikai.

Priklausomai nuo partijos Assigned Calibrator Values (nurodytosios kalibravimo medžiagos vertės), skirtas ADVIA Chemistry sistemoms, koeficientą (Coeff (FV)), išreikštą common units (bendrieji vienetai, mg/dl) ir SI Units (SI vienetais, mg/l), žr. su kalibravimo medžiagos rinkiniu pateiktoje nurodytųjų kalibravimo medžiagų verčių lentelėje.

Kalibravimo medžiagos paruošimas

Reagentas paruoštas naudoti.

Išmetimas

Biologiškai pavojingas ir biologiškai užterštas medžiagas išmeskite laikydamiesi įstaigos praktikos reikalavimų. Visas medžiagas išmeskite saugiu ir priimtiniu būdu bei laikydamiesi visų federalinių, šalies ir vietinių reikalavimų.

Natrio azidas gali reaguoti su vario bei švino vamzdžiais ir sudaryti sprogius metalo azidus. Jei šalinimas į kanalizaciją atitinka federalinius, šalies ir vietos reikalavimus, šalinamus reagentus praplaukite dideliu kiekiu vandens, kad nesikaupytų azidai.

Standartizacija

Vertės atsekamos pagal metodo standartizaciją kiekvienam specifiniam tyrimui. Papildomą informaciją rasite metodo lape.

Simbolių paaiškinimas

Ant produkto etiketės gali būti toliau pateikti simboliai:

Simbolis	Apibrėžimas	Simbolis	Apibrėžimas
	<i>In vitro</i> diagnostinis medicininis įrenginys	REF	Katalogo numeris
	Oficialus gamintojas		Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje
	CE ženklas		CE ženklas su notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeriu
	Žr. naudojimo instrukcijas		Biologinis pavojus
	Neužšaldykite (> 0°C)		Temperatūros apribojimas (2–8°C)
	Apatinė temperatūros riba (≥ 2°C)		Viršutinė temperatūros riba (≤ -10°C)
	Saugoti nuo saulės šviesos ir karščio		Aukštyn
	Tinka naudoti iki		Kiekio pakanka (n) tyrimų atlikti
	Partijos kodas	Rev.	Peržiūra
YYYY-MM-DD	Datos formatas (metai-mėnuo-diena)		Atspausdinta sojų rašalu
	Perdirbti		Tirpinimo tūris
	Įprasti vienetai		SI vienetai

Techninė pagalba

Klientų aptarnavimo klausimais kreipkitės į vietinį techninės pagalbos specialistą arba platintoją.

www.siemens.com/diagnostics

ADVIA yra Siemens Healthcare Diagnostics prekinis ženklas.

© 2009 Siemens Healthcare Diagnostics. Visos teisės saugomos.

Made in: UK



Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
511 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591-5097 USA



Siemens Healthcare Diagnostics Ltd.
Sir William Siemens Sq.
Frimley, Camberley, UK GU16 8QD

Global Siemens Headquarters

Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
80333 Muenchen
Germany

Global Siemens Healthcare Headquarters

Siemens AG
Healthcare Sector
Henkestrasse 127
91052 Erlangen
Germany
Phone: +49 9131 84-0
www.siemens.com/healthcare

Global Division

Siemens Healthcare
Diagnostics Inc.
511 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591-5097
USA
www.siemens.com/diagnostics

