

Multiclean / Sample Cleaner 1

cobas®

Užsakymo informacija

REF	CONTENT	Analizatorius (-iai), su kuriuo (-iais) galima naudoti rinkinį (-ius)
04880277 190	Multiclean (2 x 2 L)	Roche/Hitachi 902 analizorius Roche/Hitachi cobas c analizatorius
04708725 190	Sample Cleaner 1 (SmpCln1) (12 x 59 mL)	Roche/Hitachi cobas c 311/501 analizatoriai
05352991 190	Sample Cleaner 1 (SmpCln1) (12 x 20 mL)	Roche/Hitachi cobas c 502/701/702 analizatoriai Roche/Hitachi cobas c 513 analizatorius*

Kai kurie nurodyti analizatoriai ir rinkiniai gali būti neprieinami visose šalyse. Dėl papildomų pritaikymų sistemoms, susisiekite su jūsų vietiniu Roche Diagnostics atstovu.

*neskirta JAV

Lietuvių

Paskirtis

Roche/Hitachi sistemose naudojamų mėginių adatų ir reakcijos kamerų plovimo tirpalas.

Santrauka

Mėginių adatų ir reakcijos kamerų plovimas gali būti reikalingas dėl galimos sąveikos su kitais reagentais ar mėginiais. Šie specialūs plovikliai užtikrina mėginių veikimo patikimumą.

Reagentai - darbiniai tirpalai

Natrio hidroksido tirpalas 1 mol/L

Atsargumo priemonės ir įspėjimai

Skirta naudoti in vitro diagnostikai.

Laikykites įprastų atsargumo priemonių, būtinų dirbant su visais laboratorijos reagentais.

Visos atliekos turi būti tvarkomos laikantis vietos reikalavimų. Saugos duomenų lapas pateikiamas profesionaliems naudotojams paprašius.

Skirta JAV: Tik specialiam naudojimui.

Šiame rinkinyje yra komponentų, kurie pagal reglamentą (EB)

Nr. 2008/1272 skirstomi į šias klases:



Pavojus

H290 Gali esdinti metalus.

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Prevenција:

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Veiksmai, kurių reikia imtis:

P303 + P361 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.

P304 + P340 + P310 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvaikvėpuoti. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Produktų saugumo žymėjimas parengtas vadovaujantis ES GHS gairėmis. Kontaktinis telefono numeris: visos šalys: +49-621-7590, JAV: 1-800-428-2336

Reagentų paruošimas

Paruoštas naudojimui

Pastaba

Bėgant laikui buteliuko apačioje gali atsirasti nežymių spalvos pokyčių ar nuosėdų. Spalvos pokytis ar nuosėdos neturi poveikio reagentų veikimui.

Laikymo sąlygos ir stabilumas

Tinkamumo laikas 15-25 °C temperatūroje: Žr. galiojimo datą ant etikečių

04708725 190

Naudojamo analizatoriuje: 4 savaitės

05352991 190

Naudojamo analizatoriuje: 2 savaitės

04880277 190

Atidarius: 12 savaičių

Kuomet nenaudojate, laikykite Multiclean uždarytą.

Naudojamo **cobas c** analizatoriuje: 4 savaitės

Naudojamo ir šaldomo Roche/Hitachi analizatoriuje: 4 savaitės

Pateiktos medžiagos

Apie reagentus skaitykite skyriuje „Reagentai - darbiniai tirpalai“.

Reikalingos (bet nepateikiamos) medžiagos

Skaitykite skyriuje „Užsakymo informacija“

Roche/Hitachi analizatoriai ir tyrimų reagentai.

Apie papildomas reikalingas medžiagas skaitykite atitinkamame metodo lape ir naudotojo vadove.

Tyrimas

Naudokite Multiclean / Sample Cleaner 1 taip, kaip nurodyta atitinkamose sistemos reagentų naudojimo instrukcijose.

Išsamesnės informacijos ieškokite jus dominančio analizatoriaus naudotojo vadove, atitinkamuose pritaikymo aprašuose, produkto informacijoje ir visų reikiamų komponentų pakuočių informaciniuose lapeliuose.

Šiuose informaciniuose lapeliuose kaip dešimtainės trupmenos skyriklis visada naudojamas taškas, skiriantis sveikąjį skaičių nuo dešimtainės trupmenos skaitmenų. Tūkstančių skyrikliai nenaudojami.

Simboliai

Roche Diagnostics papildomai naudoja šiuos simbolius ir ženklus, be išvardintų standarte ISO 15223-1.

CONTENT

Rinkinio turinys

REAGENT

Reagentas

CALIBRATOR

Kalibratorius



Tūris po atskiedimo arba maišymo

GTIN

Visuotinis prekybos identifikacijos numeris (angl. Global Trade Item Number)

Multiclean / Sample Cleaner 1

cobas[®]

Papildymai, naikinimai ar pakeitimai yra pažymėti pakeitimų juosta paraštėje.

© 2015, Roche Diagnostics



Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
www.roche.com



JAV platina:

Roche Diagnostics, Indianapolis, IN

JAV vartotojų techninė pagalba 1-800-428-2336