

ISE Cleaning Solution / Elecsys SysClean



11298500 316

5 x 100 ml

*Lietuvių k.***Paskirtis**

Roche/Hitachi analizatorių ISE blokų valymui.
Elecsys analizatorių valymui.

Santrauka

ISE Cleaning Solution / Elecsys SysClean yra šarminis valymo tirpalas, kuriame yra mikrobus naikinančių dalelių.

Reagentai – sudėtis ir koncentracijos

5 buteliukai, kiekviename po 100 ml

Komponentai:

Natrio hidroksidas 3 mol/l

Natrio hipochlorito tirpalas (< 2 % aktyvus chloras)

Papildas

Atsargumo priemonės ir išpėjimai

Skirtas *in vitro* diagnostikai

Laikykitės įprastinių atsargumo reikalavimų, kurių reikia, dirbant su visais laboratorijos reagentais.

Pateikę prašymą vartotojai specialistai gali gauti saugos duomenų lapą.

Perspėjimas. Šiame komplekte yra komponentų, kurie pagal Europos Direktyvą 88/379/EEB klasifikuojami taip:



C – korozinis (natrio hidroksidas) R35; S26 – 37/39 – 45:

Sukelia sunkius nudegimus. Patekus į akis, tuoj pat išplaukite gausiu vandens kiekiu ir kreipkitės į medikus. Dėvėkite tinkamas pirštines ir akių/veido apsaugą. Nelaimingo atsitikimo atveju ar pablogėjus savijautai nedelsdami kreipkitės į medikus (jeigu įmanoma, parodykite etiketę).

Telefonas kontaktams: visose šalyse: +49-621-7590; JAV: +1-800-428-2336.

Visas atliekas reikia tvarkyti taip, kaip nurodyta vietinėse rekomendacijose.

Paruošimas

Tirpalas yra paruoštas naudojimui.

Laikymo sąlygos ir stabilumas

Laikykite nuo šviesos apsaugotoje vietoje.

Tirpalas yra stabilus iki nurodytos galiojimo datos, saugant 2–8°C temperatūroje.

Pateiktos medžiagos

ISE Cleaning Solution / Elecsys SysClean

Reikalingos (bet nepateiktos) medžiagos

- Bendroji laboratorijos įranga
- Roche/Hitachi ar Elecsys analizatorius

Naudojimo instrukcija

Žr. naudotojo vadove ir priežiūros instrukcijų lapeliuose.

ELECSYS ir COBAS yra Roche prekių ženklai.

Kiti firminiai ženklai arba produktų pavadinimai yra jų atitinkamų turėtojų prekių ženklai.

Reikšmingi papildymai pažymėti pakeitimų brūkšniais parašėje.

©2008 Roche Diagnostics



Roche Diagnostics GmbH, D-68298 Mannheim

Gamintojo atstovas Lietuvoje:

UAB Roche Lietuva, Diagnostikos padalinys

J.Jasinskio g. 16 B, LT-01112 Vilnius

Tel. (8 5) 254 6777, Faks. (8 5) 254 6778

