



5.5 cyderinamua ou shock Pulse - SE litotriptorinimi

ShockPulse Lithotripsy System

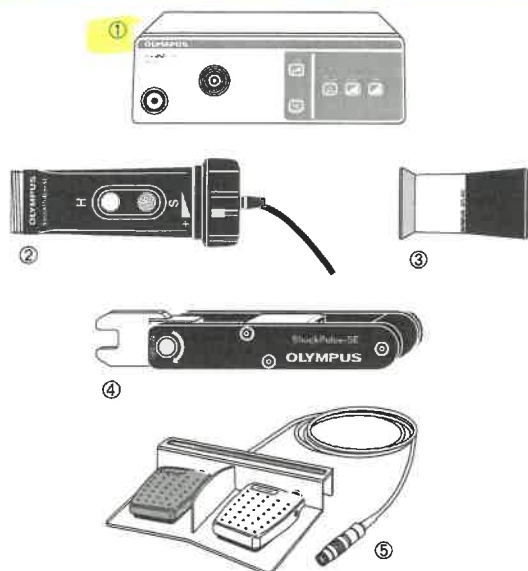

- | | | |
|---|------------------|--|
| ① | EGSPL-SR | ShockPulse-SE Lithotripsy System
<i>Delivery includes: Generator, Transducer, Nose Cone, Power Cord, Cleaning Stylet & Wrench</i> |
| ② | EGSPL-T | ShockPulse Lithotripsy Transducer |
| ③ | EGSPL-NC | ShockPulse Lithotripsy Nose Cone |
| ④ | EGSPL-W | ShockPulse Lithotripsy Wrench |
| ⑤ | EGSPL-FS | ShockPulse Lithotripsy Footswitch |
| | EGSPL-CSL | ShockPulse Lithotripsy Cleaning Stylet - Large (not shown) |
| | EGSPL-PC | ShockPulse Lithotripsy Power Cord (not shown) |

Accessories

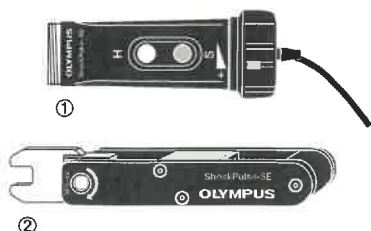

- | | |
|------------------|---|
| ① EGSPL-T | ShockPulse Lithotripsy Transducer |
| ② EGSPL-W | ShockPulse Lithotripsy Wrench <ul style="list-style-type: none">▪ Compatible with ShockPulse Probes |

Sterile, Single Use Lithotripsy Probes



- | | |
|----------------------|---|
| EGSPL-PDBX376 | ShockPulse Lithotripsy Probe, Sterile
Single Use, 3.76 mm <ul style="list-style-type: none">■ 396 mm length■ Silver |
| EGSPL-PDBX340 | ShockPulse Lithotripsy Probe, Sterile
Single Use, 3.40 mm <ul style="list-style-type: none">■ 396 mm length■ Blue |
| EGSPL-PDBX183 | ShockPulse Lithotripsy Probe, Sterile
Single Use, 1.83 mm <ul style="list-style-type: none">■ 418 mm length■ Red |
| EGSPL-PDBX150 | ShockPulse Lithotripsy Probe, Sterile
Single Use, 1.50 mm <ul style="list-style-type: none">■ 564 mm length■ Green |
| EGSPL-PDBX097 | ShockPulse Lithotripsy Probe, Sterile
Single Use, 0.97 mm <ul style="list-style-type: none">■ 578 mm length■ Gold |

3 pcs. per box

Reusable ShockPulse Lithotripsy Probes



- | | |
|--------------------|--|
| EGSPL-PR376 | Shockpulse Lithotripsy Probe, Reusable, (1/ea)
<ul style="list-style-type: none"> 396 mm length <i>5.3. ilqis</i> Silver <i>5.4. sideabri</i> |
| EGSPL-PR340 | Shockpulse Lithotripsy Probe, Reusable, (1/ea)
<ul style="list-style-type: none"> 396 mm length Blue |
| EGSPL-PR183 | Shockpulse Lithotripsy Probe, Reusable, (1/ea)
<ul style="list-style-type: none"> 418 mm length Red |
| EGSPL-PR150 | Shockpulse Lithotripsy Probe, Reusable, (1/ea)
<ul style="list-style-type: none"> 564 mm length Green |
| EGSPL-PR097 | Shockpulse Lithotripsy Probe, Reusable, (1/ea)
<ul style="list-style-type: none"> 578 mm length Gold |

Gaisro ir sprogdimo pavojai

1. Naudojami aplinkoje, kurioje yra degių dujų arba didelė deguonies koncentracija, saugokitės gaisro pavojaus. Jo išvengti padeda įprastos atsargumo priemonės. Gaminys nėra apsaugotas nuo sprogdimo.
2. Šio gaminio galiniame skyde yra aušinimo ventiliatorius, o šoniniuose skyduose – ventiliacijos angos šilumai išleisti. Neuždenkite džiuvintuvo įvado ir šoninių ventiliacijos angų. Palikite bent 5 cm tarpą tarp generatoriaus ir kitų objektų.

Pavojai sveikatai

Pavojai sveikatai

Galima padidėjusi sveikatos rizika pacientams šiais atvejais:

- Aktyvus kraujavimo sutrikimas.
- Nėštumo metu.
- Implantavus elektrinį stimuliatorių, pvz., širdies stimuliatorių.
- Negydyta šlapimtakio infekcija.

Atsakingas gydytojas, remdamasis bendra paciento būkle, turi nuspręsti, ar planuotas naudojimas galimas.

Bendroji informacija

1. Su „ShockPulse-SE“ generatoriais naudokite tik „ShockPulse-SE“ zondus ir priedus. Naudojant kitokius zondus su sistema „ShockPulse-SE“ kyla pavojus sužeisti pacientą arba prietaisus suges ir neveiks, kaip turėtų.
2. Kad veikimas būtų tinkamas, atlikite nurodytus tikrinimo darbus prieš pirmą kartą naudodami ir reguliariai po to. Kiekvieną kartą prieš naudodami kruopščiai patikrinkite visus elektros kabelius ir zondus. Nenaudokite, jei yra pablogėjimo požymių. Pastebėję bet kokią žalą ar per didelį nusidėvėjimą, pakeiskite. Patikrinkite, ar keitiklio kištuko kontaktai, laidas ir keitiklio korpusas mechanškai nepažeisti (ar nesulinkę kontaktai, ar nėra įtrūkių ir pan.). Kiekvieną kartą panaudoję, prieš valydami ir sterilizuodami atidžiai patikrinkite, ar keitiklyje ir kabelyje nėra įtrūkimo, įskilimų ir kitokios žalos požymių. Nenaudokite sistemos „ShockPulse-SE“, jei ji neatitinka etiketėse nurodytų kriterijų arba buvo sugadinta. Antraip kyla pavojus sužeisti pacientą ar darbuotojus ir (arba) pakenkti procedūrai.
3. Siekiant išvengti per aukšto slėgio susidarymo, būtinas nuolatinis irigacijos srautas iš kūno ertmės (operacijos vietos).
4. Kaip BF tipo darbinės dalies šio prietaiso niekada negalima dėti tiesiai prie širdies, jo negalima naudoti per procedūras, susijusias su širdies stebėjimu ar operacija. Atikdami litotripsiją pacientui nenaudokite prietaisų, kuriais teka elektros srovė, pvz., elektrochirurginių įrenginių.
5. Kai sistema „ShockPulse-SE“ suaktyvinta, zondo antgalis visada turi būti matymo lauke.
6. Kaip ir naudojant kitus litotripsijos prietaisus, galimi nepageidaujami reiškiniai, pvz., kraujavimas ir (arba) šlapimo pūslės, šlapimtakio ar inksto pažeidimas, taip pat kiti su endoskopija susiję reiškiniai.

Zondai

7. Jei zondas sulūžta atliekant procedūrą, išimkite jį naudodami griebimo įrankį. Visada turėkite atsarginį zondo rinkinį, kad galėtumėte užbaigti procedūrą.
8. Naudotojas turi įsitikinti, kad endoskopą galima naudoti su toliau nurodytais „ShockPulse-SE“ zondais.

Sterilūs vienkartiniai „ShockPulse“ litotripsijos zondai		Min. darbinis kanalas
SPL-PD376	„ShockPulse“ litotripsijos zondas, sterilus, vienkartinis, 3,76 mm	4 mm (12 Fr)
SPL-PD340	„ShockPulse“ litotripsijos zondas, sterilus, vienkartinis, 3,40 mm	3,5 mm (10,5 Fr)
SPL-PD183	„ShockPulse“ litotripsijos zondas, sterilus, vienkartinis, 1,83 mm	2 mm (6 Fr)
SPL-PD150	„ShockPulse“ litotripsijos zondas, sterilus, vienkartinis, 1,50 mm	2 mm (6 Fr)
SPL-PD097**	„ShockPulse“ litotripsijos zondas, sterilus, vienkartinis, 0,97 mm	1 mm (3 Fr)
Daugkartiniai „ShockPulse“ litotripsijos zondai (galima naudoti penkis (5) kartus)		Min. darbinis kanalas
SPL-PR376	„ShockPulse“ litotripsijos zondas, daugkartinis, 3,76 mm	4 mm (12 Fr)
SPL-PR340	„ShockPulse“ litotripsijos zondas, daugkartinis, 3,40 mm	3,5 mm (10,5 Fr)
SPL-PR183	„ShockPulse“ litotripsijos zondas, daugkartinis, 1,83 mm	2 mm (6 Fr)
SPL-PR150	„ShockPulse“ litotripsijos zondas, daugkartinis, 1,50 mm	2 mm (6 Fr)
SPL-PR097**	„ShockPulse“ litotripsijos zondas, daugkartinis, 0,97 mm	1 mm (3 Fr)

** Siurbimas negalimas.

9. Sterilūs „ShockPulse-SE“ zondai yra vienkartiniai prietaisai, kaip nurodyta etiketėje, juos galima naudoti tik vieną kartą.
10. Gleivinės audinio nelieskite suaktyvinto zondo antgaliu, nes galite pažeisti audinį.
11. Zondo antgalio nenaudokite 15 cm atstumu nuo širdies stimuliatoriaus. Pacientus, kuriems implantuotas širdies stimuliatorius, per procedūrą reikia stebėti fiksuojant EKG ir įsitikinti, kad širdies ritmas ir stimuliatoriaus veikimas yra tinkami.

2 psl.