

# ISE Standard Low

REF 11183974 216

10 x 3 mL

## Lietuvių

### Sistemos informacija

Naudojant Roche/Hitachi analizatoriuose ir **cobas c** analizatoriuose, kalibratoriaus kodas yra 502.

### Paskirtis

ISE Standard Low yra skirtas jonams selektyvių elektrodų (angl. Ion Selective Electrodes) kalibravimui Roche/Hitachi analizatoriuose ir **cobas c** analizatoriuose.

### Santrauka

ISE Standard Low yra vandeninis preparatas su gravimetriškai nustatytomis elektrolitų koncentracijomis.

Šis produktas yra skirtas natrio, kalio ir chloridų reikšmių standartizacijai, naudojant Roche/Hitachi Ion Selective Electrodes.

Kai kurie metodai, nurodyti tinkamame reikšmių lapelyje, gali nebūti prieinami visose šalyse.

### Reagentai - darbiniai tirpalai

10 ampulių, kiekvienoje 3 mL

#### Reaktyvūs komponentai:

120 mmol/L Na<sup>+</sup>, 3 mmol/L K<sup>+</sup>, 80 mmol/L Cl<sup>-</sup>

Reikšmės, skirtos **cobas c** analizatoriams (išskyrus **cobas c 111** analizatorių), yra užkoduotos elektroninėse bylose atsiųstose per **cobas** link į analizatorių.

### Atsargumo priemonės ir įspėjimai

Skirtas naudoti in vitro diagnostikai sveikatos priežiūros specialistams. Laikykitės įprastų atsargumo priemonių, būtinų dirbant su visais laboratorijos reagentais.

Infekcinės ir mikrobiologinės atliekos:

Įspėjimas: su atliekomis dirbkite kaip su potencialiai biologiškai pavojingomis medžiagomis. Atliekas šalinkite pagal priimtas laboratorijos instrukcijas ir procedūras.

Pavojus aplinkai:

Laikykitės visų galiojančių vietinių šalinimo reglamentų, kad pasirinktumėte saugų šalinimą.

Saugos duomenų lapas pateikiamas profesionaliems naudotojams paprašius.

Skirta JAV: DĖMESIO: Federaliniai įstatymai leidžia šį prietaisą parduoti tik gydytojui arba gydytojo paskyrimu.

### Paruošimas

Kai dirbate su ampulėmis, naudokite apsauginius akinius. Naudodami marlę ar apsauginę medžiagą atsargiai nulaukite ampulės viršūnę.

Naudokite laikydamiesi Jūsų Roche/Hitachi arba Roche/Hitachi **cobas c** naudotojo vadovo ISE skyriaus instrukcijų.

Pridėtos brūkšninio kodo etiketės yra skirtos kalibratorių identifikacijai, išimtinai **cobas c** sistemoms. Pritvirtinkite brūkšninio kodo etiketes prie mėgintuvėlių su mėginių indeliais, pripildytais kalibratoriaus medžiagos.

PASTABA: Kai brūkšninio kodo pažymėtas mėgintuvėlis yra naudojamas tik kaip indelių laikiklis, jis gali būti pakartotinai panaudotas, jei ISE standarto partijos numeris nesikeičia.

### Laikymo sąlygos ir stabilumas

Laikyti 15-25 °C temperatūroje.

Stabilumas:

Neatidarius: Iki nurodytos galiojimo datos 15-25 °C temperatūroje.

Po atidarymo: Atidarytos ampulės turėtų būti naudojamos nedelsiant. Likęs turinys neturi būti saugomas, kad būtų išvengta netikslių kalibravimų.

### Pateiktos medžiagos

- Apie reagentus skaitykite skyriuje „Reagentai - darbiniai tirpalai“
- Brūkšninio kodo etiketės

### Reikalingos (bet nepateikiamos) medžiagos

- Roche sistemos reagentai ir klinikinės chemijos analizatorius
- Bendra laboratorijos įranga

### Tyrimas

Naudokite ISE Standard Low taip, kaip nurodyta Roche/Hitachi arba Roche/Hitachi **cobas c** naudotojo vadove.

Šiuose informaciniuose lapeliuose kaip dešimtainės trupmenos skyriklis visada naudojamas taškas, skiriantis sveikąjį skaičių nuo dešimtainės trupmenos skaitmenų. Tūkstančių skyrikliai nenaudojami.

Bet koks rimtas įvykis, kurio atsiradimas yra susijęs su prietaiso naudojimu, turėtų būti pranešamas gamintojui ir kompetentingai valstybės narės, kurioje yra naudotojas ir / ar pacientas, institucijai.

### Simboliai

Roche Diagnostics papildomai naudoja šiuos simbolius ir ženklus, be išvardytų standarte ISO 15223-1 (skirta JAV: naudojamų simbolių apibūdinimo ieškokite [dialog.roche.com](http://dialog.roche.com)):

CONTENT

Rinkinio turinys

CALIBRATOR

Kalibratorius



Tūris po atskiedimo arba maišymo

GTIN

Visuotinis prekybos identifikacijos numeris (angl. Global Trade Item Number)

Papildymai, naikinimai ar pakeitimai yra pažymėti pakeitimų juosta parašėje.

© 2021, Roche Diagnostics



Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim  
[www.roche.com](http://www.roche.com)

+800 5505 6606



JAV platina:

Roche Diagnostics, Indianapolis, IN  
JAV vartotojų techninė pagalba 1-800-428-2336