

ISE Standard High

REF 11183982 216

10 x 3 mL

Lietuvių

Sistemos informacija

Kalibratorių kodai, naudojant Roche/Hitachi analizatoriuose ir **cobas c** analizatoriuose, yra:
ISE Standard High kaip S2: Kodas 503
ISE Standard High kaip S3: Kodas 763

Paskirtis

ISE Standard High yra skirtas jonams selektyvių elektrodų (angl. Ion Selective Electrodes) kalibravimui Roche/Hitachi analizatoriuose ir **cobas c** analizatoriuose.

Santrauka

ISE Standard High yra vandeninis preparatas su gravimetriškai nustatytais elektrolitų koncentracijomis.

Šis produktas yra skirtas natrio, kalio ir chloridų reikšmių standartizacijai, naudojant Roche/Hitachi Ion Selective Electrodes.

Kai kurie metodai, nurodyti tinkamame reikšmių lapelyje, gali nebūti prieinami visose šalyse.

Reagentai - darbiniai tirpalai

10 ampulių, kiekvienoje 3 mL

Reaktyvūs komponentai:

160 mmol/L Na⁺, 7 mmol/L K⁺, 120 mmol/L Cl⁻

ISE Standard High kaip S2: Reikšmės, skirtos **cobas c** analizatoriams (išskyrus **cobas c** 111 analizatorių), yra užkoduotos elektroninėse bylose atsiųstose per **cobas** link į analizatorių.

ISE Standard High kaip S3: Reikšmės turi būti įvestos rankiniu būdu.

Atsargumo priemonės ir įspėjimai

Skirtas naudoti in vitro diagnostikai sveikatos priežiūros specialistams. Laikykitės įprastų atsargumo priemonių, būtinų dirbant su visais laboratorijos reagentais.

Infekcinės ir mikrobiologinės atliekos:

Įspėjimas: su atliekomis dirbkite kaip su potencialiai biologiškai pavojingomis medžiagomis. Atliekas šalinkite pagal priimtas laboratorijos instrukcijas ir procedūras.

Pavojus aplinkai:

Laikykitės visų galiojančių vietinių šalinimo reglamentų, kad pasirinktumėte saugų šalinimą.

Saugos duomenų lapas pateikiamas profesionaliems naudotojams paprašius.

Skirta JAV: DÉMESIO: Federaliniai įstatymai leidžia šį prietaisą parduoti tik gydytojui arba gydytojo paskyrimu.

Paruošimas

Kai dirbate su ampulėmis, naudokite apsauginius akinius. Naudodami marlę ar apsauginę medžiagą atsargiai nulaužkite ampulės viršūnę.

Naudokite laikydamiesi Jūsų Roche/Hitachi arba Roche/Hitachi **cobas c** naudotojo vadovo ISE skyriaus instrukcijų.

Pridėtos brūkšninio kodo etiketės yra skirtos kalibratorių identifikacijai, išimtinai **cobas c** sistemoms. Pritvirtinkite brūkšninio kodo etiketes prie mėgintuvėlių su mėginių indeliais, pripildytais kalibratoriaus medžiagos.

PASTABA: Kai brūkšninio kodo pažymėtas mėgintuvėlis yra naudojamas tik kaip indelių laikiklis, jis gali būti pakartotinai panaudotas, jei ISE standarto partijos numeris nesikeičia.

Laikymo sąlygos ir stabilumas

Laikyti 15-25 °C temperatūroje.

Stabilumas:

Neatidarius: Iki nurodytos galiojimo datos 15-25 °C temperatūroje.

Po atidarymo: Atidarytos ampulės turėtų būti naudojamos nedelsiant. Likęs turinys neturi būti saugomas, kad būtų išvengta netikslių kalibravimų.

Pateiktos medžiagos

- Apie reagentus skaitykite skyriuje „Reagentai - darbiniai tirpalai“

- Brūkšninio kodo etiketės

Reikalingos (bet nepateikiamos) medžiagos

- Roche sistemos reagentai ir klinikinės chemijos analizatorius
- Bendra laboratorijos įranga

Tyrimas

Naudokite ISE Standard High taip, kaip nurodyta Roche/Hitachi arba Roche/Hitachi **cobas c** naudotojo vadove.

Šiuose informaciniuose lapeliuose kaip dešimtainės trupmenos skyriklis visada naudojamas taškas, skiriantis sveikąjį skaičių nuo dešimtainės trupmenos skaitmenų. Tūkstančių skyrikliai nenaudojami.

Bet koks rimtas įvykis, kurio atsiradimas yra susijęs su prietaiso naudojimu, turėtų būti pranešamas gamintojui ir kompetentingai valstybės narės, kurioje yra naudotojas ir / ar pacientas, institucijai.

Simboliai

Roche Diagnostics papildomai naudoja šiuos simbolius ir ženklus, be išvardytų standarte ISO 15223-1 (skirta JAV: naudojamų simbolių apibūdinimo ieškokite dialog. Roche.com):

CONTENT	Rinkinio turinys
CALIBRATOR	Kalibratorius
→	Tūris po atskiedimo arba maišymo
GTIN	Visuotinis prekybos identifikacijos numeris (angl. Global Trade Item Number)

Papildymai, naikinimai ar pakeitimai yra pažymėti pakeitimų juosta parašėje.

© 2021, Roche Diagnostics



Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
www.Roche.com

+800 5505 6606



JAV platina:

Roche Diagnostics, Indianapolis, IN

JAV vartotojų techninė pagalba 1-800-428-2336