


BM-100C TRANSKUTANINIS BILIRUBINO MATUOKLIS

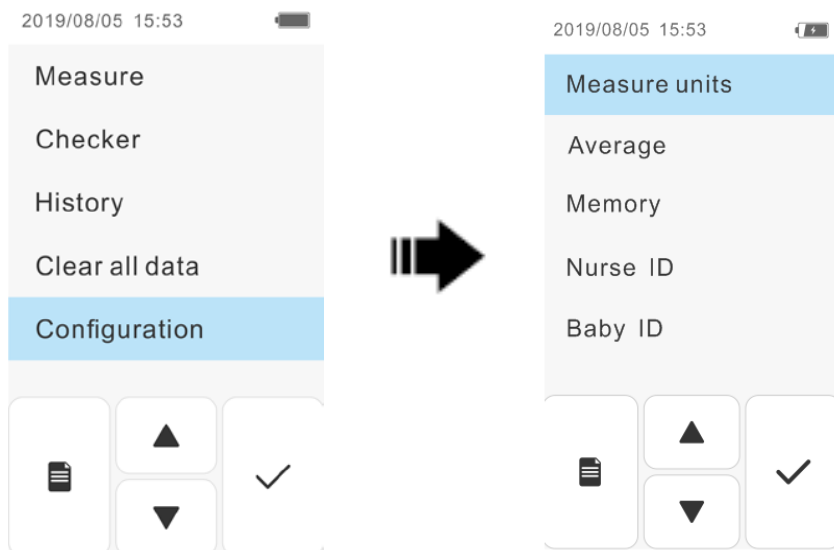

Įrangos nustatymai

- 1 Paspauskite įjungimo mygtuką ir palaikykite 5 sekundes, kad įjungtumėte įrangą ir įeitumėte į pagrindinį meniu.
- 2 Meniu ekrane pasirinkite «Configuration». Arba paspauskite ▲ ar ▼ ir nueikite iki «Configuration». Tada paspauskite ant užrašo «Configuration» arba nuspauskite ✓, kad patektumėte į parametrų nustatymo meniu langą.

- 3 Nustatymų ekrane pasirinkite elementus, kuriuos norite keisti, tada nustatykite juos kiekvieną atskirai:

Measure units (matavimo vienetai): nustatykite norimą matavimo vienetą.


Average (vidutinis): nustatykite, kiek kartų bus atliekamas vidutinis matavimas. pvz "3 kartus".

Memory (atmintis): nustatykite, ar išmatuoti duomenys bus išsaugoti, ar ne.

Nurse ID (slaugytojo ID): pasirinkite slaugytojo ID įvesties metodą. Pasirinkite rankinį įvedimą, brūkšninio kodo nuskaitymą arba «None» (nereikia įvesti slaugytojo ID).

Baby ID (Kūdikio ID): pasirinkite kūdikio ID įvesties metodą. Pasirinkite rankinį įvedimą arba brūkšninį kodą. Po nustatymo paspauskite ✓ patvirtinimui.

BM-100C TRANSKUTANINIS BILIRUBINO MATUOKLIS

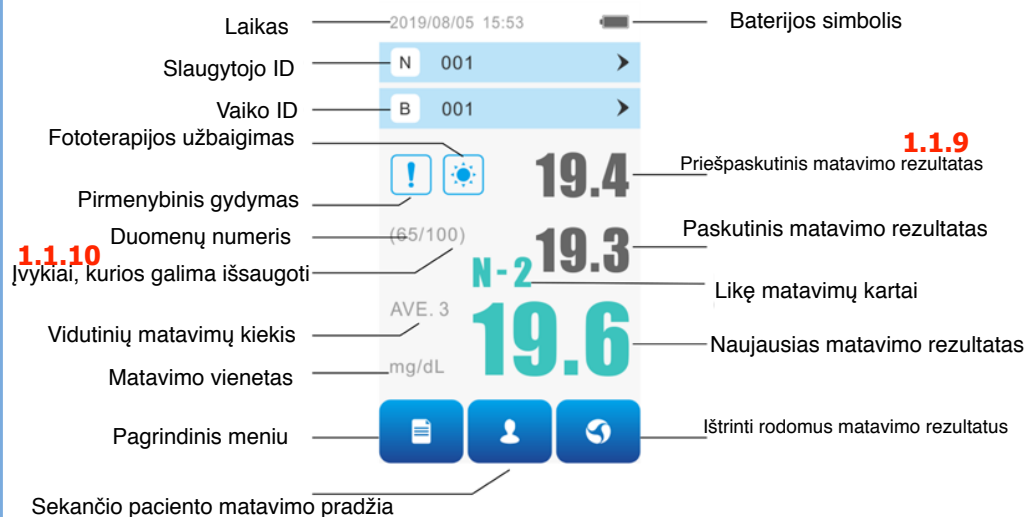

Matavimai

- ① Meniu ekrane pasirinkite „Configuration“, kad patektumėte į matavimo ekraną.
- ② Išvalykite optinį zondą medicininiu alkoholiu.
- ③ Įsitinkite, kad dega žalia indikatorius lemputė „Ready“, parodanti, kad įrenginys yra paruoštas matavimui.
- ④ Padėkite optinį zondą vertikaliai ant matavimo taško (krūtinkaulio arba kaktos) ir švelniai spauskite, kol pradės švytėti. Išmatuotos vertės bus rodomos ekrane. Įvertinkite išmatuotą vertę.
- ⑤ Jei vidutinis matavimų skaičius nustatytas kelis kartus, pakartokite aukščiau nurodytus veiksmus ③ ④ punktuose. Po kelių matavimų yra procedūra yra užbaigta ir ekrane rodoma vidutinę matavimo vertę.

Pastaba: jei prietaisas neveiks ilgiau nei 1 min., ekranas išsijungs ir nieko nebus rodoma. Palieskite ekraną, kad jį suaktyvinti. Jei maitinimas IŠJUNGTA, paspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką ilgiau nei 5 sekundes, kad įjungtumėte prietaisą.

EDITION/REVISION A-0
DATE OF ISSUE 2021/09