

Hydrocoll

Naudojimo instrukcija

Produkto aprašymas

„Hydrocoll“ – savaime prilimpantis, absorbuojamasis hidrokoloidinis žaizdų tvarstis su natrio karboksimetilceliulioze, poliizobutilenu, stirolo-izopreno-stirolo bloko kopolimeru, stirolo-izopreno bloko kopolimeru ir garams pralaidžiu poliuretano sluoksniu, nepraleidžiančiu skysčių ir bakterijų, padengtu mediciniais akrilinais klijais.

Ypatybės ir veikimo metodas

Hidrokoloidui absorbuojant žaizdos eksudatą, susidaro gelis ir tokiu būdu sukuriama drėgna aplinka žaizdoje. Gelio sluoksnis neleidžia „Hydrocoll“ prilipti prie žaizdos. Tvarsčio keitimas nepažeidžia granuliacinio, epitelinio audinio ir pacientui sukelia tik minimalų diskomfortą.

„Hydrocoll“ yra savaime prilimpantis tvarstis. Kadangi „Hydrocoll“ yra iš plonos ir lanksčios medžiagos, jis lengvai prisitaiko prie kūno kontūrų. Vandenį ir nešvarumus atstumiantis „Hydrocoll“ paviršius palengvina kasdienę kūno priežiūrą.

Indikacijos

„Hydrocoll“ tvarstis skirtas gydyti mažai arba vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms.

Naudojimo nurodymai

Pasirinkite tinkamos formos ir dydžio „Hydrocoll“ tvarstį. Reikėtų parinkti tokį „Hydrocoll“ tvarstį, kuris būtų bent 1 cm iš visų pusių didesnis už žaizdą, taip užtikrinant pakankamą tvarsčio fiksaciją.

„Hydrocoll“ / „Hydrocoll thin“: nuimkite apsauginį lapelį, uždėkite „Hydrocoll“ ant žaizdos ir prispauskite kraštus.

„Hydrocoll sacral“: nuimkite apsauginį lapelį, uždėkite tvarstį ant žaizdos kryžkaulio srityje ir prispauskite. Tvarsčio viršūnė gali pakilti ar nusileisti priklausomai nuo žaizdos vietos ir gylio. Tvirtai prispauskite tvarsčio kraštus.

„Hydrocoll concave“ skirtas žaizdoms alkūnės ar kulno srityje gydyti. Nuimkite didžiausią apsauginio lapelio dalį, uždėkite ant žaizdos vidurinę tvarsčio dalį. Nuimkite kitą apsauginio lapelio dalį ir prispauskite tvarsčio kraštus, uždėdami vieną ant kito.

Tvarsčiui sugeriant eksudatą, susidaro balzganas gelis, kuris pakeičia tvarsčio spalvą ir sudaro pūsleles. Tvarstį „Hydrocoll“ reikia pakeisti, kai pūslelės priartėja prie tvarsčio kraštų. Jei eksudatas teka pro tvarstį, jį reikia nedelsiant pakeisti. Norėdami pakeisti tvarstį „Hydrocoll“, pakelkite tvarsčio kraštus ir atsargiai jį nuimkite. Ant žaizdos gali likti hidrokoloidinio gelio, kurio nereikia painioti su pūliais. Jis netrukdo žaizdos gijimo procesui, o esant reikalui gelį galima nuplauti.

Jei žaizda nesudėtinga, „Hydrocoll“ gali būti keičiamas kas 7 dienas iki pat gijimo proceso pabaigos.

Kontraindikacijos

„Hydrocoll“ negalima naudoti pacientams, kurie gali būti alergiški kuriai nors sudedamajai daliai. „Hydrocoll“ negalima naudoti esant atviroms raumenų, sausgyslių ar kaulų audinius siekiančioms žaizdoms, infekuotoms žaizdoms ar trečio laipsnio nudegimams gydyti.

Atsargumo priemonės

Tvarstis „Hydrocoll“ gali būti veiksmingas tik atlikus visapusišką paciento ir žaizdos įvertinimą. Gydymas „Hydrocoll“ nepakeičia priežastinio žaizdos gydymo.

Bendrieji nurodymai

Laikykite žemesnėje nei 30 °C temperatūroje. Tvarsčiai yra sterilūs, kol nepažeista jų pakuotė. Pakartotinai nesterilizuokite. Laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.

Teksto peržiūrėjimo data: 2011-03