

Atrauman

Naudojimo instrukcija

Produkto aprašymas

„Atrauman“ – nemedikamentiniu tepalu padengtas tvarstis netrauminiam žaizdų gydymui.

Sudėtis

Tvarstį sudaro hidrofobinis poliesterio tinklelis, impregnuotas nemedikamentiniu tepalu, kurio pagrindą sudaro trigliceridai (neuralieji riebalai).

Tepalo sudėtis (pagal INCI): Caprylic/Capric/Myristic/Stearic Triglyceride; Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2.

Ypatybės ir veikimo metodas

Minkštas ir plonas poliesterio tinklelis užtikrina, kad tvarstis glaudžiai priglundą prie viso žaizdos paviršiaus ir leidžia žaizdos eksudatui pratekėti. Vandeniui atsparūs poliesterio siūlai ir lygi paviršinė tinklelio struktūra neleidžia tvarščiui prilipti prie žaizdos. Tvarščio keitimas yra neskausmingas ir netraumuojantis. Tvarstis „Atrauman“ neprilimpa prie žaizdos ir todėl, kad yra impregnuotas tepalu. Tvarstis neturi okliuzinio poveikio ir nesukelia aplink žaizdą esančios odos maceracijos. Eksudato perteklius prateka į antrinį absorbuojamąjį tvarstį, dedamą ant „Atrauman“ tvarščio. Tepalas padeda žaizdos kraštams išlikti minkštiesiems ir elastingiems, o tai skatina epitelizaciją. Tepalas yra nemedikamentinis, jo sudėtyje nėra parafinų. Nuėmus tvarstį, ant žaizdos nelieka sunkiai pašalinamų tepalo likučių, tai palengvina chirurgines procedūras ir žaizdos valymą.

Indikacijos

„Atrauman“ – sterilus, nemedikamentiniu tepalu padengtas tvarstis, skirtas gydyti bet kokio tipo paviršinems ūmiams ir lėtinėms žaizdoms. Tvarstis neprilimpa prie žaizdos, todėl jį labai tinka naudoti kaip pirmąjį sluoksnį, apsaugantį antrinį tvarstį nuo prilipimo prie žaizdos dugno ir padedantį išlaikyti žaizdos kraštų ir aplink esančios odos elastingumą. Kadangi tepalo sudėtyje nėra veikliųjų medžiagų, „Atrauman“ ypač tinka naudoti dermatologijoje, kai paciento oda yra jautri ar pasireiškia jautrumas medikamentams.

Naudojimo nurodymai

Tvarstį „Atrauman“ išimkite iš atplėšiamos pakuotės su abiem apsauginiais lapeliais ir, jei reikia, atkirpkite reikiamą tvarščio dydį pagal žaizdos plotą. Nuimkite vieną apsauginį lapelį ir šia puse uždėkite tvarstį ant žaizdos, po to nuimkite kitą apsauginį lapelį. Ant tvarščio „Atrauman“ uždėkite sterilų absorbuojamąjį tvarstį žaizdos eksudatui sugerti. Jei gydytojas ar kitas profesionalus sveikatos priežiūros specialistas nenurodo kitaip, keiskite „Atrauman“ tvarstį kiekvieno perrišimo metu. Pastaba: jei dėl terapinių priežasčių „Atrauman“ nekeičiamas ir laikomas ant žaizdos ilgesnį laiką, tepalas gali susigerti. Tokiu atveju ant esamo „Atrauman“ tvarščio galima uždėti antrąjį sluoksnį ir taip išvengti tvarščio prilipimo prie žaizdos.

Kontraindikacijos

„Atrauman“ negalima naudoti pacientams, kurie gali būti alergiški kuriai nors sudedamajai daliai.

Atsargumo priemonės

Tvarščiai yra sterilūs, kol nepažeista jų pakuotė. Laikykite horizontalioje padėtyje, kambario temperatūroje (ne aukštesnėje kaip 40° C).

Teksto peržiūrėjimo data: 2015-12

