

Dozavimo lentelė Sekusept™ aktiv



100 g miltelių = 150 ml

1 šaukštelis = 20 g miltelių = 30 ml

1 matavimo kaušelis = 100 g miltelių = 150 ml

Tirpalo kiekis litrais	Darbinio tirpalo koncentracija			
	1%	2%	3%	4%
2 litrai	30 ml	60 ml	90 ml	120 ml
4 litrai	60 ml	120 ml	180 ml	240 ml
8 litrai	120 ml	240 ml	360 ml	480 ml
10 litrų	150 ml	300 ml	450 ml	900 ml
20 litrų	300 ml	600 ml	900 ml	1200 ml
30 litrų	450 ml	900 ml	1350 ml	1800 ml

HC 1131

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

Darbinio tirpalo paruošimui naudoti pridedamą matavimo indelį (šaukštelį/kaušelį). Pastoviai maišant į vandenį (<30°C) suberti pageidaujama efektyvumui pasiekti miltelių kiekį. Pirmosiomis 15 minučių keletą kartų gerai išmaišyti. Aktyvioji medžiaga peracto rūgštis pasigamina ištirpus milteliams. Pamerkti instrumentus ir įsitikinti, kad instrumentai pilnai apsemti. Tirpalą ruošti šviežią kiekvieną dieną. Atsiradus matomam užterštumui darbinį tirpalą keisti nauju. Galimas nežymus miltelių spalvos pasikeitimas. Produkto efektyvumui įtakos tai neturi.



Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49 (0) 2173-599-1900



www.ecolab.com