

Enziminė medicininių instrumentų ir lanksčių endoskopų plovimo priemonė TS 1.1.2.

- Visų tipų instrumentams, lankstiems endoskopams, ultragarsinėms vonioms
- Efektyvus valymas TS 1.1.3.
- Ypač gerai tirpina masyvius baltymus, biologinius skysčius
- Visiškai neputojanti TS 1.1.7.

Naudojimo sritys: enziminė medicininių instrumentų ir lanksčių endoskopų plovimo priemonė. Tinka naudoti ultragarsinėse voniose ir endoskopų reprocesoriuose.

Naudojimosi instrukcija: priklausomai nuo užterštumo tipo ir lygio ipilti 5-20 ml Sekusept® Multienzyme litrui vandens. Pamerkti priemones į tirpalą. Įsitikinti, kad visos dalys pilnai apsemtos. Sutinkamai su gamintojo rekomendacijomis išplauti priemones (pvz.: naudoti šepetėliais). Naudojant ultragarsines vonias pamerkti priemones nustatytą laiką. Praėjus ekspozicijos laikui (15-5 min.), nuskalauti priemones geriamos kokybės vandeniu. Apruošiant endoskopus rankiniu būdu, išsausinti kanalus ir nuvalyti endoskopą. Proceso metu mūvėti tinkamas pirštines ir veido apsauga. Suderinama su visomis Ecolab aukšto lygio dezinfekcinėmis medžiagomis.

0,5% tirpalo paruošimas: 5 ml Sekusept® Multienzyme į 995 ml vandens – 1 Ltr darbiniam tirpalui;
2,0% tirpalo paruošimas: 20 ml Sekusept® Multienzyme į 980 ml vandens – 1 Ltr darbiniam tirpalui.

TS 1.1.4.
(koncentratas,
reikia
skiesti)

TS 1.1.5.

Ekspozicijos laikas: 0,5% - 15 min; 2,0% - 5 min. TS 1.1.6.

Sudėtis: Proteazės, amilazė, lipazė, paviršinio aktyvumo medžiagos, Korozijos inhibitoriai, tirpikliai, pagalbinės medžiagos, emulsikliai, kvepalai.

Darbo saugos taisyklės: S2 laikyti atokiau nuo vaikų. S26 patekus į akis, nedelsiant gausiai praplauti vandeniu ir skubiai kreiptis į gydytoją. Laikyti konteinerį sandariai uždarytą. Laikyti originaliame konteineryje, žemesnėje negu 25 °C temperatūroje. Nemaišyti su kitais produktais. Tik profesionaliam naudojimui.

Gamintojas:

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1, D-40789
Monheim am Rhein, Vokietija

Atstovas Lietuvoje:

UAB „Vitrolab“
Baltų per. 36-11, LT-48196 Kaunas
Tel. / faksas: (8-37) 33 33 17, 33 33 29