

Produkto aprašymas

HemoCheck-S

Kraujo likučių nustatymo testas



Prista

Hemo
pavirš
dideli
spalv
Taip
esanč
perok
parod
Perok
aldehi

ity
ël
no
s.
je
lio
ali
ą.
ar

Patikr

Tamp
tampo
tirpalu

us
ju
liu

švaraus nechloruoto vandens. Tyrimas suaktyvinamas perkeliant tiriamąjį tirpalą į aktyvatoriaus buteliuką. Tada tamponas lašinamas į aktyvintą tirpalą, o kraujo likučiai ant tampono per kelias sekundes parodomi ryškia mėlyna spalva. HemoCheck-S gali aptikti net 0,1 µg karščiu denatūruoto kraujo likučio, todėl lengvai matomas spalvos pasikeitimas.

28 p.d.
nr. 2

PAST
hemo
balint
neapti

jo ar
ačiau
) gali

Aptikimo ribos tikrinimas

10
Gr
kr
bu
at
pa
C
de
na

ndas.
ntame
raujas
l iš 4
ujo (1
ų 90 °
viklio-
buvo

R_____

2
de
gr
ko
kr
m
iš

airės į
davė
akląją
Didelis
palą į
01 µg



28 p. d. nr. 6 spalvos pasikeitimo
vertinimo etalonas

Paveikslas 2

HemoChec-S testo rezultatas, kraujo kiekis rodomas iš kairės į
dešinę: 100 µg, 10 µg, 1 µg, 0,1 µg, Akloji kontrolė



PEREG GMBH, PORSCHESTRASSE 12, D-84478 WALDKRAIBURG

„SANOVUS“, UAB
Mr. Mindaugas Danilevicius
Daugėlišio g.32-301
LT-09300 Vilnius

PEREG GMBH
ANALYTIK, HYGIENE

PORSCHESTRASSE 12
D-84478 WALDKRAIBURG
TELEFON (0638) 84100
TELEFAX (0638) 84162
E-MAIL: info@pereg.de
<http://www.pereg.de>

28 p. d. nr. 1, 2, 3

Waldkraiburg, 28.08.2023

Patvirtinimas dėl HemoCheck-S

Šiuo laišku patvirtinama, kad HemoCheck-S testų rinkiniais galima aptikti kraujo likučius po rankinio arba automatinio apdorojimo procesų. Aptikimo riba - 0,1 µg - yra vienoda tiek šviežio, tiek denatūruoto kraujo likučiams. Rezultatas (spalvos pokytis) išryškėja iš karto.

Pagar

Martir
Mana
PERE