

Techninės sąlygos	Matavimo prietaisas	Pagrindinis blokas	Elektros maitinimo blokas
Baterijos įtampa / tipas	3,7 voltų įkraunama (ličio technologija)	nenurodyta	nenurodyta
Įeinanti įtampa	+7,5 V nuolatinė srovė	+7,5 V nuolatinė srovė	nuo 90 iki 264 V kintamoji srovė
Įėjimo dažnis	nuolatinė srovė	nuolatinė srovė	nuo 50 iki 60 Hz
Įėjimo srovė	1,7 A (maks.)	1,7 A (maks.)	400 mA (maks.), esant 100–240 V AC / 50 Hz
Baterijos talpa 8.	po 360 min įkrovimo galima atlikti 100 matavimų (iš eilės)	nenurodyta	nenurodyta
Jungtys	Įkrovimo kontaktai IR prievadas Brūkšinių kodų skaitytuvas RD kortelė (tik 1–11 kanalai)	Įkrovimo kontaktai IR prievadas RJ45 Ethernet * USB, tipas B *	nuolatinės srovės jungtis keičiama kintamosios srovės įėjimo kontaktai
Duomenų perkėlimo greitis	RD kortelė: iki 54 Mbps	IR: 9,6K – 115K bps * Ethernet: 10 Mbps * USB: 12 Mbps *	nenurodyta
Min. brūkšninio kodo plotis	4 mil (1 mil = 0,0254 mm)	nenurodyta	nenurodyta
CDRH/IEC	CDRH klasė I	nenurodyta	nenurodyta
Palaikomi brūkšniniai kodai	Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13, Interleaved 2 iš 5, Codabar.	nenurodyta	nenurodyta

* Netaikoma Accu-Chek Inform II „Base“ pagrindiniam blokui

Techninės sąlygos	Reikmenų dėžutė	Kodinio rakto skaitytuvas	
Aukštis	85 mm / 3,35 col.	18,4 mm / 0,72 col.	
Plotis	280 mm / 11,02 col.	34,8 mm / 1,37 col.	
Ilgis	272 mm / 10,71 col.	70,7 mm / 2,78 col.	
Svoris	1 100 g	28 g	
Saugojimo temperatūra	nuo –25 iki 69 °C nuo –13 iki 156 °F	nuo 2 iki 25 °C nuo 36 iki 77 °F	
Santykinė drėgmė (saugojimas)	< 95%	< 93%	
Baterijos įtampa / tipas	nenurodyta	Nekeičiama	
Jungtys	nenurodyta	IR prievadas Kodinio rakto lizdas	

Produkto saugumas

Peržiūrėkite šią informaciją, kad būtų užtikrintas produkto saugumas

- Sistema tinka nepertraukiamam darbui.

PASTABA

Sistema neapsaugota nuo jai kenkiančio skysčių patekimo (klasė IP X0 pagal IEC 60529).

Bendroji priežiūra

PASTABA

Sistemos valymui naudokite tik rekomenduojamus tirpalus. Naudojant kitus tirpalus, gali sutrikti veikimas ir sugesti sistema. Užtikrinkite, kad po valymo ir dezinfekavimo matavimo prietaisas ir pagrindinis blokas būtų kruopščiai išdžiovinti.

Reikmenų dėžutė

PASTABA

Reikmenų dėžutę neškite atsargiai, už rankenos, kad būtų lengviau transportuoti. Numetus arba sutrenkus, dėžutė gali sulūžti.

Matavimo prietaisas

- Sistema automatiškai išsijungia po 10 minučių neveikimo būsenos (t.y., jei nepaliečiamas ekranas), jeigu nėra sukonfigūruota kitaip.
- Matavimo prietaisą išmeskite, kaip nurodyta atitinkamose taisyklėse ir reglamentuose. Žr. „Sistemos atliekų pašalinimas“, psl. 13.



4 Gliukozės kontrolinis tyrimas

Informacija apie gliukozės kontrolinius tyrimus

Atlikdami gliukozės kontrolinius tyrimus, laikykitės atitinkamų taisyklių ir atsakingų norminius dokumentus patvirtinančių agentūrų nurodymų.

Tiksliai nustatant žinomas gliukozės koncentracijas užtikrinama, kad taikant sistemą ir jūsų tyrimams naudojamą techniką būtų gauti tikslūs pacientų tyrimų rezultatai. Gliukozės kontrolinių tirpalų reikšmės yra apibrėžtos (žinomos). Šių tirpalų rezultatai pirmiausia turi patekti į tam tikras priimtinas reikšmių ribas, kad būtų leidžiama atlikti pagrįstą paciento ištyrimą.

Sistemą galima sukonfigūruoti taip, kad prieš tai, kai bus leista atlikti paciento tyrimą, reiktų atlikti normos ribas atitinkančių gliukozės koncentracijų kontrolinį tyrimą. Tai vadinama *QC Lockout* (kokybės kontrolės blokuote); sistema faktiškai apsisaugo, kad nereikėtų paciento ir kvalifikacijos tikrinimo tada, kai kontrolės rezultatai nėra priimtinosiose ribose.

11.

Sistemos sudėtinės dalys



Sistemos Accu-Chek Inform II sudėtinės dalys ir priedai:

- A** matavimo prietaisas,
- B** kodinio rakto skaitytuvas,
- C** pagrindinis blokas ir elektros maitinimas,
- D** reikmenų dėžutė (pavaizduota su vartojimo reikmenimis, kurių nėra komplekte).

Sistema gali būti sukonfigūruota dviem skirtingais būdais:

- 1 konfigūravimas per matavimo prietaiso „nustatymų“ funkciją (žr. 9 skyrių);
- 2 konfigūravimas per duomenų valdymo sistemą.

Pastaba: ne visos parinktys gali būti konfigūruojamos, naudojant matavimo prietaiso „nustatymų“ funkciją.

Matavimo prietaisas atlieka šias sistemos užduotis:

- veikia kaip pagrindinio naudotojo sąsaja, naudojant jautrųjį ekraną ir įjungimo-išjungimo mygtuką;
- atlieka gliukozės tyrimus;
- *18.* nuskaito brūkšninius kodus¹ (juostelių partijos numerius, kontroles, paciento ir naudotojo identifikacijos numerius) keliuose palaikomuose formatuose;
- parodo paciento tyrimų ir kontrolinių tyrimų rezultatus;
- *18.* perkelia išsaugotus duomenis į duomenų valdymo sistemą per belaidžio ryšio tinklą (WLAN, pasirinktinai) arba per Accu-Chek Inform II pagrindinį bloką (LAN).

1. Ne visose šalyse yra tyrimo juostelių indelių arba kontrolinių tirpalų brūkšniniai kodai.