

Parengta 2018 m. birželio mėn.

REF 01R0620

01R0630

Atidžiai laikytis pateiktų nurodymų. Negalima užtikrinti tyrimo rezultatų patikimumo, jeigu nesilaikoma pateiktų nurodymų.

### PAVADINIMAS

Alinity c ASO Reagent Kit

### PASKIRTIS

Alinity c ASO tyrimas yra naudojamas antistreptoliziniui O žmogaus serume kiekybiškai išmatuoti analizatoriumi Alinity c.

### PROCEDŪROS PRINCIPAI

Alinity c ASO reagentas yra vienodo dydžio polistireno latekso dalelių, padengtų streptolizinu O, suspensija. Sumaišius mėginį, kuriame yra antistreptolizino O, su reagentu, įvyksta aiški agliutinacija, kurią galima išmatuoti turbidimetrijos metodu.<sup>2,3</sup> Pagal PSO tarptautinį standartą antistreptolizino O rezultatai yra teikiami IU/mL vienetais.

Metodas: turbidimetris / imunoturbidimetris

Daugiau informacijos apie sistemą ir tyrimo technologiją pateikta Alinity ci-series naudojimo vadove, 3 skyriuje.



### REAGENTAI