

Total Protein2

FOR USE WITH
Alinity c

lt
TPRO2
04T81
H23948R02
B4T81Y

Skaityti paryškintus pakeitimus: 2022 m. vasario mėn. redakcija.

REF 04T8120

REF 04T8130

Atidžiai laikytis pateiktų nurodymų. Negalima užtikrinti tyrimo rezultatų patikimumo, jeigu nesilaikoma pateiktų nurodymų.
Naudoti tik profesiniams tikslams laboratorijoje.

PAVADINIMAS

Total Protein2 (taip pat – TPRO2)

PASKIRTIS

Total Protein2 tyrimas yra naudojamas bendram baltymui žmogaus serume arba plazmoje kiekybiškai išmatuoti sistema Alinity c.

Total Protein2 tyrimas turi būti naudojamas kaip pagalbinė priemonė diagnozuojant ir gydant įvairias kepenų, inkstų arba kaulų čiulpų ligas bei kitus medžiagų apykaitos arba mitybos sutrikimus.

PROCEDŪROS PRINCIPAI

Total Protein2 tyrimas yra automatizuotas klinikinės biochemijos tyrimas.



Polipeptidai, turintys mažiausiai dvi peptidines jungtis, reaguoja su biureto reagentu. Šarminiame tirpale vario jonai su baltymo azotu sudaro koordinacinį junginį, kuriame skirtumas tarp albumino ir globulino baltymo azoto pagrindu yra labai nedidelis.

Metodas: biureto

Daugiau informacijos apie sistemą ir tyrimo technologiją pateikta Alinity ci-series naudojimo vadove, 3 skyriuje.