

Albumin BCG2

FOR USE WITH
Alinity c

It
AlbBCG2
04U30
H23952R03
B4U30Y

2020 m. rugsėjo mėn. redakcija.

REF 04U3020

REF 04U3030

Atidžiai laikytis pateiktų nurodymų. Negalima užtikrinti tyrimo rezultatų patikimumo, jeigu nesilaikoma pateiktų nurodymų.
Naudoti tik profesiniams tikslams laboratorijoje.

PAVADINIMAS

Albumin BCG2 (taip pat – AlbBCG2)

PASKIRTIS

Albumin BCG2 tyrimas yra naudojamas albuminui žmogaus serume arba plazmoje kiekybiškai išmatuoti sistema Alinity c.
Albumin BCG2 tyrimas turi būti naudojamas kaip pagalbinių priemonė diagnozuojant ir gydant daugelį ligų, visų pirma – kepenų arba inkstų ligas.

PROCEDŪROS PRINCIPAI

Albumin BCG2 tyrimas yra automatizuotas klinikinės biochemijos tyrimas.

Albumin BCG2 procedūra yra pagrįsta tyrimo reagentu vykstančiu bromkrezolio žaliajo prisijungimu konkrečiai prie albumino, kad paciento mėginyje būtų sukurtas spalvotas kompleksas. Komplexo absorbcija esant 604 nm bangos ilgiui yra tiesiogiai proporcinga albumino koncentracijai mėginyje.

Metodas: kolorimetrinis (bromkrezolio žaliajo)



Daugiau informacijos apie sistemą ir tyrimo technologiją pateikta Alinity ci-series naudojimo vadove, 3 skyriuje.

REAGENTAI