

Skaityti paryškintus pakeitimus: 2018 m. rugsėjo mėn. redakcija.

PAVADINIMAS

Alinity i CEA Calibrators (taip pat vadinami CEA Cals)

PASKIRTIS

Kalibratoriai Alinity i CEA Calibrators yra skirti Alinity i analizatoriui sukalibruoti, kai jis yra naudojamas karcinoembrioniniam antigenui (CEA) žmogaus serume ir plazmoje kiekybiškai išmatuoti.

Papildomos informacijos yra pateikta Alinity i CEA reagentų pakuotės lapelyje ir Alinity ci-series naudojimo vadove.

SUDĖTIS



PARUOŠIMAS NAUDOTI

- Šis produktas yra naudoti paruoštos skystos konsistencijos.
- Šis produktas gali būti naudojamas iš karto išėmus jį iš 2–8 °C temperatūros šaldytuvo.
- Prieš kiekvieną naudojimą išmaišykite švelniai apversdami.



LAIKYMAS