

Skaityti paryškintus pakeitimus: 2018 m. vasario mėn. redakcija.

### PAVADINIMAS

Alinity i Prolactin Calibrators (taip pat vadinami Prolactin Cals)

### PASKIRTIS

Kalibratoriai Alinity i Prolactin Calibrators yra skirti Alinity i analizatoriui sukalibruoti, kai jis yra naudojamas prolaktinui žmogaus serume ir plazmoje kiekybiškai išmatuoti.

Papildomos informacijos yra pateikta Alinity i Prolactin reagentų pakuotės lapelyje ir Alinity ci-series naudojimo vadove.

### SUDĖTIS

Saugos duomenų lapai yra pateikti [www.abbottdiagnostics.com](http://www.abbottdiagnostics.com) arba kreipkitės į vietos atstovą.

Išsami informacija apie saugos priemones naudojant sistemą pateikta Alinity ci-series naudojimo vadove, 8 skyriuje.

### PARUOŠIMAS NAUDOTI



- Visiškai atšildykite kambario temperatūroje (15–30 °C) palaikydami 1–2 valandas arba palaikykite per naktį temperatūroje 2–8 °C temperatūroje. Negalima atšildyti aukštesnėse temperatūrose.
- Prieš kiekvieną naudojimą išmaišykite švelniai apversdami (3–4 kartus).
- Ant buteliuko užrašykite atšildyto kalibratoriaus galiojimo pabaigos datą.

### LAIKYMAS

-