

Skaityti paryškintus pakeitimus: 2020 m. rugpjūčio mėn. redakcija.

Atidžiai laikytis pateiktų nurodymų. Negalima užtikrinti tyrimo rezultatų patikimumo, jeigu nesilaikoma pateiktų nurodymų.

### PAVADINIMAS

Alinity i Total PSA Calibrators (taip pat Total PSA Cals)

### PASKIRTIS

Kalibratoriai Alinity i Total PSA Calibrators yra skirti Alinity i analizatoriui sukalibruoti, kai jis yra naudojamas bendram prostatos specifiniam antigenui (laisvam PSA ir PSA kompleksui su alfa-1-antichimotripsinu) žmogaus serume kiekybiškai išmatuoti.

Papildomos informacijos yra pateikta Alinity i Total PSA reagentų pakuotės lapelyje ir Alinity ci-series naudojimo vadove.

### RUOŠIMAS NAUDOTI

- Šis produktas yra naudoti paruoštos skystos konsistencijos.
- Šis produktas gali būti naudojamas iš karto išėmus jį iš 2–8 °C temperatūros šaldytuvo.
- Prieš kiekvieną naudojimą išmaišykite švelniai apversdami.

