

Parengta 2020 m. kovo mėn.

PAVADINIMAS

Alinity i Anti-HCV Controls (taip pat – Anti-HCV Ctrl)

PASKIRTIS

Kontrolės Alinity i Anti-HCV Controls yra skirtos Alinity i analizatoriaus kalibracijai patvirtinti, kai jis yra naudojamas antikūnams prieš hepatito C virusą (anti-HCV) žmogaus serume ir plazmoje kokybiškai aptikti.

Papildomos informacijos yra pateikta Alinity i Anti-HCV reagentų pakuotės lapelyje ir Alinity ci-series naudojimo vadove.

RUOŠIMAS NAUDOTI



- Šis produktas yra naudoti paruoštos skystos konsistencijos.
- Šis produktas gali būti naudojamas iš karto išėmus jį iš 2–8 °C temperatūros šaldytuvo.
- Prieš kiekvieną naudojimą išmaišykite švelniai apversdami.