

Skaityti paryškintus pakeitimus: 2020 m. kovo mėn. redakcija.

### PAVADINIMAS

Alinity i HIV Ag/Ab Combo Controls (taip pat vadinama HIV Ag/Ab Ctrls)

### PASKIRTIS

Kontrolės Alinity i HIV Ag/Ab Combo Controls yra skirtos tyrimo glaudumui apskaičiuoti ir analizatoriaus Alinity i sisteminiams analitiniais nuokrypiams aptikti, kai jis naudojamas ŽIV p24 antigenui ir antikūnams prieš žmogaus imunodeficito viruso 1 tipą ir (arba) 2 tipą (ŽIV-1 / ŽIV-2) žmogaus serume ar plazmoje vienu metu kokybiškai aptikti.

Papildomos informacijos yra pateikta Alinity i HIV Ag/Ab Combo reagentų pakuotės lapelyje ir Alinity ci-series naudojimo vadove.

### PARUOŠIMAS NAUDOTI

- Šis produktas yra naudoti paruoštos skystos konsistencijos.
- Šis produktas gali būti naudojamas iš karto išėmus jį iš 2–8 °C temperatūros šaldytuvo.
- Kiekvieną kartą prieš naudodami išmaišykite švelniai apversdami (5–10 kartų).

