

Skaityti paryškintus pakeitimus: 2019 m. balandžio mėn. redakcija.

PAVADINIMAS

Alinity i HBsAg Qualitative II Controls (taip pat vadinama HBsAg Qual Ctrls)

PASKIRTIS

Kontrolės Alinity i HBsAg Qualitative II Controls yra skirtos tyrimo glaudumui apskaičiuoti ir Alinity i analizatoriaus, naudojamo hepatito B viruso paviršiaus antigenui (HBsAg) žmogaus serume ir plazmoje kokybiškai aptikti ir patvirtinti reagentų rinkiniais Alinity i HBsAg Qualitative II ir Alinity i HBsAg Qualitative II Confirmatory Reagent Kits, sisteminiams analitiniais nuokrypiais aptikti.

Daugiau informacijos yra pateikta Alinity i HBsAg Qualitative II ir Alinity i HBsAg Qualitative II Confirmatory reagentų pakuočių lapeliuose bei Alinity ci-series naudojimo vadove.

PARUOŠIMAS NAUDOTI

- Šis produktas yra naudoti paruoštos skystos konsistencijos.
- Šis produktas gali būti naudojamas iš karto išėmus jį iš 2–8 °C temperatūros šaldytuvo.
- Prieš kiekvieną naudojimą išmaišykite švelniai apversdami.

