

Parengta 2017 m. balandžio mėn.

PAVADINIMAS

Alinity i Folate Calibrators (taip pat vadinama Folate Cals)

PASKIRTIS

Kalibratoriai Alinity i Folate Calibrators yra skirti analizatoriui Alinity i sukalibruoti, kai jis yra naudojamas folatams žmogaus serume, plazmoje ir eritrocituose kiekybiškai išmatuoti.

Papildomos informacijos yra pateikta Alinity i Folate reagentų pakuotės lapelyje ir Alinity ci-series naudojimo vadove.

PARUOŠIMAS NAUDOTI

- Kalibratorius išimkite iš dėžutės ir palaikykite kambario temperatūroje (nuo 15 iki 30 °C), kol jie visiškai atšils (apie 45 minutes).
- Kiekvieną kartą prieš naudodami išmaišykite švelniai apversdami (3–5 kartus).
- Siūlome ant dėžutės ar buteliukų užrašyti atšildymo datą, kad žinotumėte, kiek kartų kalibratoriai buvo atšildyti.



LAIKYMAS

-