

Skaityti paryškintus pakeitimus: 2018 m. liepos mėn. redakcija.

PAVADINIMAS

Alinity i CA 125 II Calibrators (taip pat vadinama CA 125 II Cals)

PASKIRTIS

Kalibratoriai Alinity i CA 125 II Calibrators yra skirti Alinity i analizatoriui sukalibruoti, kai jis yra naudojamas OC 125 charakterizuojamam antigenui žmogaus serume ir plazmoje kiekybiškai išmatuoti.

Papildomos informacijos yra pateikta Alinity i CA 125 II reagentų pakuotės lapelyje ir Alinity ci-series naudojimo vadove.



PARUOŠIMAS NAUDOTI

- Šis produktas yra naudoti paruoštos skystos konsistencijos.
- Šis produktas gali būti naudojamas iš karto išėmus jį iš 2–8 °C temperatūros šaldytuvo.
- Prieš kiekvieną naudojimą išmaišykite švelniai apversdami (5–10 kartų).

