

Skaityti paryškintus pakeitimus: 2018 m. kovo mėn. redakcija.

PAVADINIMAS

Alinity i Anti-TPO Calibrators (taip pat vadinami Anti-TPO Cals)

PASKIRTIS

Kalibratoriai Alinity i Anti-TPO Calibrators yra skirti Alinity i analizatoriui sukalibruoti, kai jis yra naudojamas IgG klasės autoantikūnams prieš skydliaukės peroksidazę (anti-TPO) žmogaus serume ir plazmoje kiekybiškai išmatuoti.

Papildomos informacijos yra pateikta Alinity i Anti-TPO reagentų pakuotės lapelyje ir Alinity ci-series naudojimo vadove.

PARUOŠIMAS NAUDOTI



- Visiškai atšildykite palaikydami 45–60 minučių kambario temperatūroje (15–30 °C).
- Prieš naudodami kruopščiai išmaišykite švelniai apversdami (5–10 kartų).

LAIKYMAS