

Skaityti paryškintus pakeitimus: 2020 m. sausio mėn. redakcija

### PAVADINIMAS

Alinity i Toxo IgM Calibrator (taip pat vadinama Toxo IgM Cal)

### PASKIRTIS

Kalibratorius Alinity i Toxo IgM Calibrator yra skirtas analizatoriui Alinity i sukalibruoti, kai jis naudojamas IgM antikūnams prieš *Toxoplasma gondii* žmogaus serume ir plazmoje kokybiškai aptikti. Papildomos informacijos yra pateikta Alinity i Toxo IgM reagentų pakuotės lapelyje ir Alinity ci-series naudojimo vadove.

### PARUOŠIMAS NAUDOTI

- Šis produktas yra naudoti paruoštos skystos konsistencijos.
- Šis produktas gali būti naudojamas iš karto išėmus jį iš 2–8 °C temperatūros šaldytuvo.
- Prieš kiekvieną naudojimą išmaišykite švelniai apversdami.



### LAIKYMAS