

Skaityti paryškintus pakeitimus: 2018 m. balandžio mėn. redakcija.

PAVADINIMAS

Alinity i FSH Calibrators (taip pat vadinami FSH Cals)

PASKIRTIS

Kalibratoriai Alinity i FSH Calibrators yra skirti Alinity i analizatoriui sukalibruoti, kai jis yra naudojamas folikulus stimuliuojančiam hormonui (FSH) žmogaus serume ir plazmoje kiekybiškai išmatuoti. Papildomos informacijos yra pateikta Alinity i FSH reagentų pakuotės lapelyje ir Alinity ci-series naudojimo vadove.

Saugos duomenų lapai yra pateikti www.abbottdiagnostics.com arba kreipkitės į vietos atstovą.

Išsami informacija apie saugos priemones naudojant sistemą pateikta Alinity ci-series naudojimo vadove, 8 skyriuje.

PARUOŠIMAS NAUDOTI

- Šis produktas yra naudoti paruoštos skystos konsistencijos.
- Šis produktas gali būti naudojamas iš karto išėmus jį iš 2–8 °C temperatūros šaldytuvo.
- Prieš kiekvieną naudojimą išmaišykite švelniai apversdami.



LAIKYMAS