

Skaityti paryškintus pakeitimus: 2018 m. vasario mėn. redakcija.

PAVADINIMAS

Alinity i Ferritin Calibrators (taip pat vadinama Ferritin Cals)

PASKIRTIS

Kalibratoriai Alinity i Ferritin Calibrators yra skirti Alinity i analizatoriaus, naudojamo feritinui žmogaus serume ir plazmoje kiekybiškai išmatuoti, kalibracijai.

Papildomos informacijos yra pateikta Alinity i Ferritin reagentų pakuotės lapelyje ir Alinity ci-series naudojimo vadove.

PARUOŠIMAS NAUDOTI



- Šis produktas yra naudoti paruoštos skystos konsistencijos.
- Šis produktas gali būti naudojamas iš karto išėmus jį iš 2–8 °C temperatūros šaldytuvo.
- Prieš kiekvieną naudojimą išmaišykite švelniai apversdami.

LAIKYMAS