

Skaityti paryškintus pakeitimus: 2018 m. kovo mėn. redakcija.

PAVADINIMAS

Alinity i 2nd Generation Testosterone Calibrators (taip pat vadinami Testo Cals)

PASKIRTIS

Kalibratoriai Alinity i 2nd Generation Testosterone Calibrators yra skirti Alinity i analizatoriui sukalibruoti, kai jis yra naudojamas testosteronui žmogaus serume ir plazmoje kiekybiškai išmatuoti. Papildomos informacijos yra pateikta Alinity i 2nd Generation Testosterone reagentų pakuotės lapelyje ir Alinity ci-series naudojimo vadove.

PARUOŠIMAS NAUDOTI

- Kalibratoriai gali būti atšildomi kambario temperatūroje nuo 90 iki 120 minučių arba palaikant per naktį nuo 2 iki 8 °C temperatūroje. Atšildžius siūlome ant dėžutės ar buteliukų užrašyti atšildymo datą, kad žinotumėte, kada baigiasi galiojimo laikas.
- Kiekvieną kartą prieš naudodami išmaišykite švelniai apversdami (10 kartų).

LAIKYMAS

-

