

Skaityti paryškintus pakeitimus: 2019 m. rugpjūčio mėn. redakcija.

PAVADINIMAS

Alinity i AFP Calibrators (taip pat vadinami AFP Cals)

PASKIRTIS

Kalibratoriai Alinity i AFP Calibrators yra skirti Alinity i analizatoriui sukalibruoti, kai jis yra naudojamas alfa-fetoproteinui (AFP) žmogaus serume, plazmoje ir amniono skystyje kiekybiškai išmatuoti.

Papildomos informacijos yra pateikta Alinity i AFP reagentų pakuotės lapelyje ir Alinity ci-series naudojimo vadove.

SUDĖTIS

PARUOŠIMAS NAUDOTI



- Šis produktas yra naudoti paruoštos skystos konsistencijos.
- Šis produktas gali būti naudojamas iš karto išėmus jį iš 2–8 °C temperatūros šaldytuvo.
- Prieš kiekvieną naudojimą išmaišykite švelniai apversdami.

LAIKYMAS