

Skaityti paryškintus pakeitimus: 2019 m. balandžio mėn. redakcija.

PAVADINIMAS

Alinity i HBsAg Qualitative II Calibrators (taip pat vadinama HBsAg Qual Cals)

PASKIRTIS

Kalibratoriai Alinity i HBsAg Qualitative II Calibrators yra skirti Alinity i analizatoriaus, naudojamo hepatito B viruso paviršiaus antigenui (HBsAg) žmogaus serume ir plazmoje kokybiškai aptikti ir patvirtinti reagentų rinkiniais Alinity i HBsAg Qualitative II ir Alinity i HBsAg Qualitative II Confirmatory Reagent Kits, kalibracijai.

Daugiau informacijos yra pateikta Alinity i HBsAg Qualitative II ir Alinity i HBsAg Qualitative II Confirmatory reagentų pakuočių lapeliuose bei Alinity ci-series naudojimo vadove.

SUDĖTIS



Saugos duomenų lapai yra pateikti www.abbottdiagnostics.com arba kreipkitės į vietos atstovą.

Išsami informacija apie sistemą naudojant taikomas saugos priemones pateikta Alinity ci-series naudojimo vadovo 8 skyriuje.

PARUOŠIMAS NAUDOTI



- Šis produktas yra naudoti paruoštos skystos konsistencijos.
- Šis produktas gali būti naudojamas iš karto išėmus jį iš 2–8 °C temperatūros šaldytuvo.
- Prieš kiekvieną naudojimą išmaišykite švelniai apversdami.