

Parengta 2020 m. lapkričio mėn.

REF 01R1322

Atidžiai laikykitės pateiktų nurodymų. Negalima užtikrinti tyrimo rezultatų patikimumo, jeigu nesilaikoma pateiktų nurodymų. Naudoti tik profesiniams tikslams laboratorijoje.

■ PAVADINIMAS

Alinity c IgE Reagent Kit

■ PASKIRTIS

Alinity c IgE tyrimas yra naudojamas imunoglobulinui E (IgE) žmogaus serume arba plazmoje kiekybiškai išmatuoti sistema Alinity c.

■ PROCEDŪROS PRINCIPAI

Alinity c IgE tyrimas yra automatizuotas klinikinės biochemijos tyrimas.

Alinity c IgE reagentas yra vienodo dydžio polistireno latekso dalelių, dengtų monokloniniais antikūnais prieš žmogaus IgE, suspensija. Sumaišius mėginį, kuriame yra IgE, su reagentu, įvyksta aiški agliutinacija, kurią galima išmatuoti turbidimetrijos metodu.^{2, 3}

Rezultatai yra teikiami IgE IU/mL pagal PSO 2-ąją tarptautinę pamatinę medžiagą.



Metodas: turbidimetris / imuniturbidimetris

Daugiau informacijos apie sistemą ir tyrimo technologiją pateikta Alinity ci-series naudojimo vadove, 3 skyriuje.

■ REAGENTAI