

URITROL™
Urinalysis Control*Uritrolis Skysta
šlapimo kontrolė***REF**Katalogo Nr. U5-11 URITROL Liquid level 1 (3 x 15ml) U5-12 URITROL Liquid level 2 (3 x 15ml) U5-13 **URITROL Liquid level 1,2 (2 x 15ml)****Paskirtis**

- Tik profesionaliam naudojimui
- Uritrol™ šlapimo kontrolinė medžiaga skirta tyrimų atlikimo kokybei užtikrinti dirbant vizualiniu ar automatinio metodu.

Produkto aprašymas

Uritrol™ kontrolė skysta medžiaga, pagaminta iš žmogaus šlapimo ir kitų medžiagų. Joje taip pat yra stabilizatorių ir konservantų.

Perspėjimas: Kontrolinės medžiagos sudedamosios dalys pagamintos iš žmogaus šlapimo ir testuotos FDA patvirtintais metodais. Jose nenustatyta (neigiamas rezultatas) HBsAg, HCV ir HIV1,2 antikūnų. Tačiau joje gali būti ir kitų žmogaus kilmės medžiagų, kurių FDA nereikalauja tirti. Dėl to rekomenduojama su kontroline medžiaga dirbti, kaip su potencialiai pavojinga.

Stabilumas ir saugojimas

Neatidarytą kontrolę saugokite 2-8°C temperatūroje (šaldytuve) iki datos, užrašytos ant pakuotės.

Atidaryta pakuotė lieka stabili 2 savaites, jei saugoma kambario temperatūroje, sandariai užsuktą dangteliu.

Pastaba: po atidarymo nelaikykite kontrolės šaldytuve. Temperatūros pokyčiai kenkia stabilumui.

Darbo eiga

Šis produktas turėtų būti naudojamas pagal prietaiso, rinkinio ar reagento pateiktas instrukcijas. Prieš atliekant kontrolės tyrimą, leiskite kontrolei pasiekti kambario temperatūrą. Prieš kiekvieną naudojimą sumaišykite turinį vartydami kelias minutes. Pakeiskite dangtelį iš karto po naudojimo ir laikykite, kaip aprašyta „Stabilumas ir saugojimas“ skyriuje. Pašalinti panaudotą kontrolę reikia pagal jūsų saugos taisyklės.

Naudojimo instrukcija.

Vizualiniam ir pusiau automatiniam šlapimo cheminiam analizatoriui:

- 1) Atidarykite dangtelį ir kryptim viršus – apačia užpilkite lašelį kontrolės.

Pastaba: nelieskite juostelių paviršiaus buteliuku, kad išvengtumėte kontrolės pakartotinio sugėrimo.

Platintojas UAB „Diagnosticinės sistemos“ Kalvarijų sodų 1, Nr.2 Lt-08342 Vilnius Tel. Nr. : 8 5 2740494, Faksas: 8 5 2777620

- 2) Pašalinkite perteklinį šlapimą nuo juostelės ir vertinkite rezultatus vizualiniu arba pusiau automatiniu būdu.
- 3) Po naudojimo iš karto pakeiskite dangtelį.

Visiškai automatiniam analizatoriui:

- 1) Atidarykite dangtelį ir supilkite URiTROL skystį į švarų mėgintuvėlį. Minimalus tūris yra skirtingas ir priklauso nuo kiekvieno analizatoriaus. (URiSCAN super +: 2 ml).
- 2) Iškart po naudojimo pakeiskite dangtelį.
- 3) Įstatykite mėgintuvėlį su kontrole ir atlikite tyrimą.

Tikėtinios reikšmės

Tikėtinios reikšmės gali skirtis priklausomai nuo skirtingo loto ir juostelių. Galimos reikšmės yra surašytos pagal atitinkamus mėginius ir sudarytos YD diagnostics. Visos reikšmės buvo nustatytos gamintojo, kurios buvo gautos tyrimo metu. Rekomenduojama, kad kiekviena laboratorija nustatytų savo numatomus analizių intervalus.

Darbo eigos paribojimai

- Uritrol™ kontrolės nenaudokite pasibaigus galiojimo laikui.
- Kiekvieną kartą atsargiai sumaišykite kontrolę.
- Atskirų parametrų reikšmės yra pakuotės viduje.

Analitė	YD Uriscan viz. ir automa. vert.	
	Vertinimo ribos	
	1-as lygis	2-as lygis
BLD	Neg	50-250 RBC/μl 2+ - 3+
BIL	Neg	1,0-3,0 mg/dl 17-50 μmol/l 2+ - 3+
URO	0,1-1,0 mg/dl Normal	4-12 mg/dl 66-197 μmol/l 2+ - 4+
KET	Neg	10 – 100 mg/dl 1 – 10 mmol/l 1+ - 3+
PRO	Neg	100 – 1000 mg/dl 1 – 10 g/l 2+ - 4+
NIT	Neg	Pos
GLU	Neg	250 – 2000 mg/dl 14 – 111 mmol/l 1+ - 4+
pH	5,0 – 7,5	5,0 – 7,0
S.G.	1,005 – 1,025	1,010 – 1,030
Refr.	1,000 – 1,010	1,0215– 1,030
LEU	Neg	25 – 500 WBC μl/l 1+ - 3+
VTC	10 – 50 mg/dl 0,6–2,8 mmol/l	neg
MALB	10 – 30 mg/l Neg – 1+	80-150 mg/l 2+ - 3+
CRE	10– 100 mg/dl 0,9 – 4,4 mmol/l +/- - 2+	100-300 mg/dl 8,8 – 26,5mmol/l 2+ - 4+

Analitė	Siemens viz. ir automa. vert.	
	Vertinimo ribos	
	1-as lygis	2-as lygis
GLU	Neg	250-≥1000 mg/dl
BIL	Neg	Small-large 1+ - 3+
KET	Neg	15 - ≥ 160 mg/dl 1+ - 4+
S.G.	1,000-1,020	1,010- ≥1,030
Refr.	1,000-1,010	1,015-1,030
BLD	Neg	Small-large 1+ -3+
pH	5,0 – 7,0	5,0 – 7,0
PRO	Neg	30- ≥300 mg/dl 1+ - 3+
URO	0,2-1,0 EU/dl	2,0- ≥8,0 EU/dl
NIT	Neg	pos
LEU	Neg	Small-large 1+ - 3+

Analitė	Roche viz. ir automa. vert.	
	Vertinimo ribos	
	1-as lygis	2-as lygis
S.G.	1,005 – 1,025	1,005 – 1,025
Refr.	1,000 – 1,010	1,015-1,030
pH	5,0 – 7,0	5,0 – 8,0
LEU	Neg	25-500 WBC/μl 1+ - 3+
NIT	Neg	pos
PRO	Neg	25- 500 mg/dl 1+ - 4+
GLU	Neg	50 – 1000 mg/dl 1+ - 4+
KET	Neg	5- 150 mg/dl
URO	Norm	1 – 12 mg/dl 1+ - 4+
BIL	Neg	1,0 – 6,0 mg/dl
BLD	Neg	25-250 RBC/μl 2+ - 5+