



Dansac produktų katalogas 2021




Hollister gamybos centras Kaune, Lietuvoje

„Hollister Lietuva“ yra naujausia bendrovės gamykla, įsikūrusi Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje. Gamykla oficialiai atidaryta 2019 m. rudenį, joje gaminamos „Hollister“ ir „Dansac“ stomos priežiūros priemonės, o taip pat ir šlapimo šalinimo sutrikimų priežiūros priemonės. Planuojamų investicijų dydis siekia 50 mln. eur. Per ateinančius kelerius metus numatoma, kad „Hollister Lietuva“ Kauno rajone bus sukūrusi daugiau nei 500 darbo vietų.

„Hollister Lietuva“ veikla yra paremta Misijos įgyvendinimu – padėti žmonėms, naudojančioms mūsų gaminius ir paslaugas, gyventi oriau ir patogiau.



Norėdami pažiūrėti vaizdo įrašą apie „Hollister Lietuva“ augimą, nuskenuokite QR kodą kairėje savo išmaniojo telefono kamera

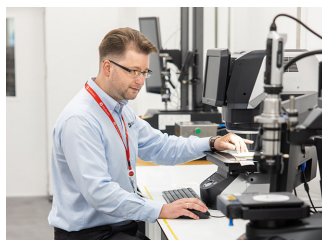

Daugiau galimybių naudojant NovaLife ir Nova

NovaLife ir Nova Jums ir Jūsų pacientams siūlo platų priemonių pasirinkimą. Abi šios produktų linijos užtikrina saugumą ir komfortą bei turi vienodą rinktuvų sujungimo sistemą, todėl yra galimybė Nova ir NovaLife produktus derinti tarpusavyje.

NOVALIFE

Naujos kartos Dansac rinktuvai, pagaminti, remiantis Nova produktų linijos savybėmis ir privalumais

NOVA

Klasikiniai, gerai žinomi Dansac rinktuvai.

Plokštelės

Pagamintos iš GX hidrokoloido
Plonėjančiais kraštais
Ovalo formos
Apvalus ir ovalus stomos skersmens matuoklis



Plokštelės

Pagamintos iš GX hidrokoloido
Plonėjančiais kraštais
Rombo formos
Apvalus ir ovalus stomos skersmens matuoklis

Atviri maišeliai

Integruota "hook-lock" uždarymo sistema
Paslepiamas išleidimo mechanizmas
Sumažinta maišelio viršutinė dalis



Atviri maišeliai

Integruota uždarymo sistema "Hook-lock" užsegimas

Uždari maišeliai

Nauja ergonomiška forma
Vandeniui atspari medžiaga
Sumažinta maišelio viršutinė dalis




Uždari maišeliai

Klasikinė forma
Vandeniui atspari medžiaga

Dviejų dalių rinktuvai

Skirtingų spalvų žiedai
Girdimas spragtelėjimas
Pakeliamas žiedas

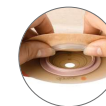

Dviejų dalių rinktuvai

Skirtingų spalvų žiedai
Girdimas spragtelėjimas
Pakeliamas žiedas

Filtrai

Naujos kartos itin efektyvus NovaLife filtras
Apsauginiai filtro pleistrai nėra naudojami



Filtrai

Dviguba filtro apsauga
Apsauginiai filtro pleistrai

Speciali priežiūra



Speciali priežiūra

NovaLife Stomos priežiūros priemonės

NovaLife Uždari Rinktuvai

NovaLife 1 Vienos dalies uždari maišeliai

6

NovaLife Atviri Rinktuvai

NovaLife 1 Vienos dalies atviri maišeliai

7

NovaLife 2 Dviejų dalių atviri maišeliai

9

NovaLife Plokštelės

NovaLife 2 Lygios plokštelės

11

NovaLife 2 Išgaubtos plokštelės

13

Nova Stomos priežiūros priemonės

Nova Uždari Rinktuvai

Nova 1 Vienos dalies uždari maišeliai

17

Nova Atviri Rinktuvai

Nova 1 Vienos dalies atviri maišeliai

17

Nova 1 Vienos dalies maišeliai naujagimiams

19

Nova 2 Dviejų dalių atviri maišeliai

21

Nova Urostominiai Rinktuvai

Nova 1 Vienos dalies urostominiai maišeliai X3

23

Nova 2 Dviejų dalių urostominiai maišeliai

25

Nova 2 Plokštelės

Nova 2 Lygios plokštelės

27

Nova 2 Išgaubtos plokštelės

29

Papildomos Stomos Priežiūros Priemonės

Dansac GX-tra hidrokoloidinės masės žiedai, Dansac Soft pasta

31

Dansac EasiSpray medicininių klijų valiklis, Dansac Nodor S kvapo neutralizatorius

32

Dansac Skin Lotion servetėlės, Stomos diržas

33



Stoma
Skin
Soul

“Negalėčiau pasakyti, kad aš esu tokia kaip visi. Aš tikrai nesu tokia kaip visi, bet ar visi žmonės yra vienodi? Manau, jog”
“kitoks” yra naujas terminas sąvokai “normalus” “... ir tik visų kompanijų bendro darbo dėka yra kiekvieną dieną laužomos nusistovėjusios normos.”

Lauren, stomos advokatė

NovaLife Stomos Priežiūros Priemonės

NovaLife Uždari maišeliai

NovaLife Atviri maišeliai

NovaLife Plokštelės

NovaLife™ 1 Vienos dalies uždari/atviri rinktuvai

Šie rinktuvai yra sukurti, siekiant užtikrinti saugų jų sukibimą su oda bei suteikti judėjimo laisvę ir komfortą žmonėms, gyvenantiems su stoma.

Produktų savybės

- Rinktuvų plokštelė yra pagaminta iš GX™ hidrokoloido, todėl yra saugi odai bei itin lanksti
- Ovalo formos plokštelė turi storesnį sluoksnį aplink stomą, kuris į jos kraštus palaipsniui išplonėja
- Ne centre esanti plokštelės pradinė anga suteikia galimybę rinktuvą priklijuoti žemiau, ties apatine pilvo dalimi
- Sumažinta maišelio sritis virš lipniosios dalies apsaugo jį nuo suglebimo
- Rinktuvo išleidimo mechanizmas yra diskretiškai paslepiamas
- Lanksčios išleidimo mechanizmo plokštelės užtikrina lengvą ir patogų maišelio ištuštinimą bei jo valymą
- Saugus Velcro® lipnus užsegimas
- NovaLife™ filtras padeda sumažinti maišelio išsipūtimo riziką
- Maišelis yra padengtas švelnia ir vandeniui atsparia medžiaga



NovaLife 1 Uždari rinktuvai

NOVALIFE	MIDI	MIDI
	NEPERMATOMI	PERMATOMI
Pradinė anga	REF kodas	REF kodas
10 mm - * (paruoštas iškirpimui)	901 - 10	902 - 10

Specifikacija

Maksimalus iškirpimo skersmuo (plotis x aukštis mm)*	55 x 70	55 x 70
Maišelio dydis (mm)	190 x 145	190 x 145
Talpa (ml)	470	470
Pakuotė	30 vnt.	30 vnt.



NovaLife 1 Atviri rinktuvai

NOVALIFE	MIDI	MIDI	MAXI	MAXI
	NEPERMATOMI	PERMATOMI	NEPERMATOMI	PERMATOMI
Pradinė anga	REF kodas	REF kodas	REF kodas	REF kodas
10 mm - * (paruoštas iškirpimui)	923 - 10	924 - 10	915 - 10	916 - 10

Specifikacija

Maksimalus iškirpimo skersmuo (plotis x aukštis mm)*	55 x 70	55 x 70	70 x 90	70 x 90
Maišelio dydis (mm)	239 x 144	239 x 144	259 x 158	259 x 158
Talpa (ml)	420	420	550	550
Pakuotė	30 vnt.	30 vnt.	10 vnt.	10 vnt.

NovaLife™ 2 Dviejų dalių rinktuvų atviri maišeliai

Šie maišeliai yra sukurti, siekiant užtikrinti judėjimo laisvę bei komfortą žmonėms, gyvenantiems su stoma. NovaLife™ dviejų dalių rinktuvai turi saugų maišelio ir plokštelės sujungimo mechanizmą bei gali būti naudojami tiek su lygiomis, tiek su išgaubtomis plokštelėmis.

Produkto savybės

- Saugus užsegimo mechanizmas - maišelio ir plokštelės sujungimo metu yra girdimas spragtelėjimas
- Skirtingų spalvų plokštelės ir maišelio žiedai suteikia galimybę vizualiai įsitikinti rinktuvo sujungimo sandarumu
- Maišelio išleidimo mechanizmas yra diskretiškai paslėpiamas
- Lanksčios išleidimo mechanizmo plokštelės užtikrina lengvą ir patogų maišelio ištuštinimą bei jo valymą
- Saugus Velcro® lipnus užsegimas
- NovaLife™ filtras padeda sumažinti maišelio išsipūtimo riziką
- Kilpelės, esančios žiedo šonuose, yra skirtos lengvam stomos diržo pritvirtinimui
- Maišelis yra padengtas švelnia ir vandeniui atsparia medžiaga



NovaLife 2

Atviri maišeliai

NOVALIFE	MIDI	MIDI	MAXI	MAXI
	NEPERMATOMI	PERMATOMI	NEPERMATOMI	PERMATOMI
Žiedo dydis	REF kodas	REF kodas	REF kodas	REF kodas
● 36 mm	1315 - 36	1316 - 36		
● 43 mm	1315 - 43	1316 - 43	1321 - 43	1322 - 43
● 55 mm	1315 - 55	1316 - 55	1321 - 55	1322 - 55
● 70 mm	1315 - 70	1316 - 70	1321 - 70	1322 - 70
Specifikacija				
Maišelio dydis (mm)	239 x 144	239 x 144	259 x 158	259 x 158
Talpa (ml)	440	480	650	690
Pakuotė	30 vnt.	30 vnt.	30 vnt.	30 vnt.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie produktus ar užsisakyti pavyzdžių, kreipkitės į Dansac produktų specialistus.

NovaLife™ 2 Lygios plokštelės

Išskirtinio ovalo formos plokštelės, kurios padeda apsaugoti peristominę odą ir yra sukurtos lengvam ir paprastam naudojimui bei saugiam sukibimui su oda.

Produkto savybės

- Saugus užsegimo mechanizmas - plokštelės ir maišelio sujungimo metu yra girdimas spragtelėjimas
- Skirtingų spalvų plokštelės ir maišelio žiedai suteikia galimybę vizualiai įsitikinti rinktuvo sujungimo sandarumu
- Plokštelės žiedas yra pusiau fiksuotas - tai suteikia galimybę jam judėti laisvai bei prisitaikyti prie kūno linijų
- Plokštelė yra pagaminta iš GX™ hidrokoloido, todėl yra saugi odai bei itin lanksti
- Ovalo formos plokštelė turi storesnį sluoksnį aplink stomą, kuris į jos kraštus palaipsniui išplonėja
- Ne centre esanti plokštelės pradinė anga suteikia galimybę rinktuvą priklijuoti žemiau, ties apatine pilvo dalimi
- Galima rinktis iš keturių plokštelių dydžių su įvairaus diametro pradinėmis angomis



NovaLife 2

Lygios plokštelės

NOVALIFE

Žiedo dydis	Pradinė anga	Maksimalus iškirpimo skersmuo	REF kodas	REF kodas	REF kodas	REF kodas
36 mm	10 mm (paruošta iškirpimui) 20 mm (iškirpta anga)	28 mm	1736 - 10 1736 - 20			
43 mm	10 mm (paruošta iškirpimui) 25 mm (iškirpta anga) 30 mm (iškirpta anga)	35 mm		1743 - 10 1743 - 25 1743 - 30		
55 mm	10 mm (paruošta iškirpimui) 35 mm (iškirpta anga) 40 mm (iškirpta anga)	47 mm			1755 - 10 1755 - 35 1755 - 40	
70 mm	10 mm (paruošta iškirpimui)	62 mm				1770 - 10

Specifikacija

Plokštelės dydis (mm)			85 x 72	105 x 89	105 x 89	125 x 106
Pakuotė			5 vnt.	5 vnt.	5 vnt.	5 vnt.


Informaciją apie Dansac papildomas stomas priežiūros priemonės rasite 30-33 puslapiuose

NovaLife™ 2 Išgaubtos plokštelės

Išskirtinio ovalo formos plokštelės, kurios padeda apsaugoti peristominę odą ir yra sukurtos lengvam ir paprastam naudojimui bei saugiam sukibimui su oda. Išgaubtos plokštelės sukuria spaudimą aplink stomą, taip padėdamos ją iškelti virš odos.

Produkto savybės

- 6 mm išgaubimo gylis padeda iškelti įdubusią stomą virš odos
- Platus plokštelių dydžių pasirinkimas užtikrina jų pritaikymą įvairaus skermens stomoms
- Saugus užsegimo mechanizmas - plokštelės ir maišelio sujungimo metu yra girdimas spragtelėjimas
- Plokštelė turi pakeliamą žiedą, kurio dėka, fiksuojant maišelį, nesukeliamas spaudimas į pilvo ertmę
- Skirtingų spalvų plokštelės ir maišelio žiedai suteikia galimybę vizualiai įsitikinti rinktuvo sujungimo sandarumu
- Plokštelė yra pagaminta iš GX™ hidrokoloido, todėl yra saugi odai
- Ovalo formos plokštelė turi storesnį sluoksnį aplink stomą, kuris į jos kraštus palaipsniui išplonėja
- Galima rinktis iš keturių plokštelių dydžių su įvairaus diametro pradinėmis angomis

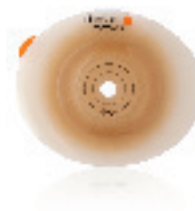

NovaLife 2

Išgaubtos plokštelės

NOVALIFE

Žiedo dydis	Pradinė anga	Maksimalus iškirpimo skersmuo	REF kodas	REF kodas	REF kodas	REF kodas
36 mm	10 mm (paruošta iškirpimui) 20 mm (iškirpta anga)	23 mm	1936 - 10 1936 - 20			
43 mm	10 mm (paruošta iškirpimui) 25 mm (iškirpta anga) 30 mm (iškirpta anga)	30 mm		1943 - 10 1943 - 25 1943 - 30		
55 mm	10 mm (paruošta iškirpimui) 35 mm (iškirpta anga) 40 mm (iškirpta anga)	42 mm			1955 - 10 1955 - 35 1955 - 40	
70 mm	10 mm (paruošta iškirpimui)	59 mm				1970 - 10

Specifikacija

Išgaubimo gylis (mm)			6	6	6	6
Plokštelės dydis (mm)			107 x 91	116 x 98	130 x 110	150 x 127
Pakuotė			5 vnt.	5 vnt.	5 vnt.	5 vnt.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie produktus ar užsisakyti pavyzdžių, kreipkitės į Dansac produktų specialistus.



Stoma
Skin
Soul

Igalina žmones jaustis patogiai
savame kūne

dansac O



Stoma
Skin
Soul

"Didžiausias iššūkis man buvo pati
operacija, o ne suformuota stoma.
Dabar aš jaučiuosi patogiai ir esu
patenkintas savimi, nes po šios
operacijos mano gyvenimo kokybė
ženkliai pagerėjo"



Nils, Krono maištininkas

Nova Stomos priežiūros priemonės

Nova Uždari maišeliai

Nova Atviri maišeliai

Nova Urostominiai maišeliai


Nova 2 Plokštelės

Nova™ 1 Vienos dalies uždari/atviri rinktuvai

Ergonomiška rinktuvų forma užtikrina didesnį komfortą žmonėms, gyvenantiems su stoma

Produkto savybės

- Rinktuvų plokštelė yra pagaminta iš GX™ hidrokoloido, todėl yra saugi odai bei itin lanksti
- Nova™ filtras absorbuoja nemalonų kvapą bei šalina susidariusias dujas, o tai sumažina maišelio išsipūtimo riziką
- Maišelis yra padengtas švelnia ir vandeniui atsparia medžiaga
- Integruotas rinktuvo uždarymo mechanizmas apačioje yra sutvirtintas lanksčiomis plokštelėmis bei turi saugų Velcro® lipnų užsegimą - tai užtikrina lengvą ir patogų maišelio ištuštinimą bei valymą

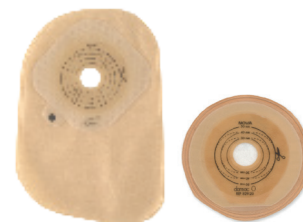

Nova 1

Uždari rinktuvai

NOVA'	MIDI	MIDI
	NEPERMATOMI	PERMATOMI
Pradinė anga	REF kodas	REF kodas
20 - 60 mm (paruošta iškirpimui)	801 - 20	802 - 20
Specifikacija		
Plokštelės dydis (mm)	100 x 100	100 x 100
Maišelio dydis (mm)	194 x 150	194 x 150
Talpa (ml)	420	420
Pakuotė	30 vnt.	30 vnt.



Nova 1

Atviri rinktuvai

NOVA' FoldUp	MIDI	MIDI	MAXI	MAXI
	NEPERMATOMI	PERMATOMI	NEPERMATOMI	PERMATOMI
Pradinė anga	REF kodas	REF kodas	REF kodas	REF kodas
15 - 60 mm (paruošta iškirpimui)	823 - 15	824 - 15		
15 - 90 mm (paruošta iškirpimui)			815 - 15	816 - 15
Specifikacija				
Plokštelės dydis (mm)	100 x 100	100 x 100	125 x 125	125 x 125
Maišelio dydis (mm)	265 x 148	265 x 148	306 x 180	306 x 180
Talpa (ml)	510	510	800	800
Pakuotė	30 vnt.	30 vnt.	10 vnt.	10 vnt.

Nova™ 1 Vienos dalies atviri rinktuvai naujagimiams

Ergonomiška rinktuvų forma užtikrina didesnį komfortą naujagimiams, turintiems stomą

Produkto savybės

- Rinktuvų plokštelė yra pagaminta iš GX™ hidrokoloido, todėl yra saugi odai bei itin lanksti
- Maišelis yra padengtas švelnia ir vandeniui atsparia medžiaga



NOVA¹
Infant

Nova 1

Atviri rinktuvai kūdikiams

Pradinė anga

10 - 40 mm
(paruošta iškirpimui)

KŪDIKIAMS

PERMATOMI

REF kodas

818 - 10

Specifikacija

Plokštelės dydis (mm)	70 x 70
Maišelio dydis (mm)	208 x 111
Talpa (ml)	250
Pakuotė	30 vnt.
Minkštos maišelio uždarymo juostelės	30

Informaciją apie Dansac papildomas stomos priežiūros priemones rasite 30-33 puslapiuose

Nova™ 2 Dviejų dalių rinktuvų atviri maišeliai

Šie ergonomiškos formos dviejų dalių rinktuvų atviri maišeliai yra sukurti, siekiant pagerinti stomuotų žmonių gyvenimo kokybę. Nova™ 2 rinktuvai turi saugų maišelio ir plokštelės sujungimo mechanizmą bei gali būti naudojami su visomis Dansac plokštelėmis.

Produkto savybės

- Integruotas rinktuvo uždarymo mechanizmas apačioje yra sutvirtintas lanksčiomis plokštelėmis bei turi saugų Velcro® lipnų užsegimą - tai užtikrina lengvą ir patogų maišelio ištuštinimą bei valymą
- Saugi užsegimo sistema - maišelio ir plokštelės sujungimo metu yra girdimas spragtelėjimas
- Skirtingų spalvų plokštelės ir maišelio žiedai suteikia galimybę vizualiai įsitikinti rinktuvo sujungimo sandarumu
- Maišelis yra sudarytas iš dviejų ertmių - tai suteikia papildomą apsaugą filtrui nuo užsikimšimo žarnų turiniu bei užkerta kelią kvapo atsiradimui
- Nova™ filtras absorbuoja nemalonų kvapą bei šalina susidariusias dujas, o tai sumažina maišelio išsipūtimo riziką
- Kilpelės, esančios žiedo šonuose, yra skirtos lengvam stomos diržo pritvirtinimui
- Maišelis yra padengtas švelnia, vandeniui atsparia medžiaga



Nova 2

Atviri maišeliai

NOVA²
FoldUp

MIDI

NEPERMATOMI

Žiedo dydis	REF kodas
36 mm	1215 - 36
43 mm	1215 - 43
55 mm	1215 - 55
70 mm	1215 - 70

Specifikacija

Maišelio dydis (mm)	265 x 148
Talpa (ml)	590
Pakuotė	10 vnt.

Informaciją apie Dansac papildomas stomos priežiūros priemones rasite 30-33 puslapiuose

Nova™ 1 Vienos dalies X3 Urostominiai rinktuvai

Ergonomiškos formos maišeliai yra sukurti, siekiant užtikrinti didesnę komfortą žmonėms, gyvenantiems su stoma. X3 rinktuvų plokštelė turi storesnį hidrokoloido sluoksnį aplink stomą, kuris suteikia papildomą apsaugą peristominei odai.

Produkto savybės

- Rinktuvų plokštelės storis aplink stomą - 3 mm
- Plokštelė yra pagaminta iš GX™ hidrokoloido, todėl yra saugi odai bei itin lanksti
- Maišeliuose yra integruotas negrįžtančios krypties vožtuvas, kuris neleidžia šlapimui tekėti atgaline kryptimi
- Saugus ir paprastas išleidimo mechanizmas
- Auksinio lašo indikatorius - leidžia matyti kada maišelio išleidimo kranelis yra atidarytas, o kada uždarytas
- Saugus ir paprastas naktinio šlapimo surinkėjo prijungimo prie urostominio maišelio mechanizmas
- Maišelis yra padengtas švelnia ir vandeniui atsparia medžiaga



Nova 1 X3 Urostominiai rinktuvai

NOVA' X3 Urostomy	MAIŠELIS	NAKTINIS RINKTUVAS	ADAPTERIS
	PERMATOMAS	PERMATOMAS	PERMATOMAS
Pradinė anga	REF kodas	REF kodas	REF kodas
		420 - 00	400 - 50
12 - 46 mm (paruošta iškirpimui)	892 - 12		

Specifikacija			
Plokštelės dydis (mm)	106 x 106		
Maišelio dydis (mm)	245 x 150	295 x 210	
Talpa (ml)	330	2000	
Pakuotė	10 vnt.*	10 vnt.+vamzdelis 120 cm	10 vnt.

*+ 1 adapteris ir 10 kamštelių

Norėdami gauti daugiau informacijos apie produktus ar užsisakyti pavyzdžių, kreipkitės į Dansac produktų specialistus.

Nova™ 2 Urostominiai maišeliai

Šie ergonomiškos formos dviejų dalių urostominių rinktuvų maišeliai yra sukurti, siekiant pagerinti žmonių, turinčių urostomą, gyvenimo kokybę. Nova™ 2 maišeliai turi saugų maišelio ir plokštelės sujungimo mechanizmą bei gali būti naudojami su visomis Dansac plokštelėmis.

Produkto savybės

- Saugus ir paprastas šlapimo išleidimo mechanizmas
- Maišeliuose yra integruotas negrįžtančios krypties vožtuvas, kuris neleidžia šlapimui tekėti atgaline kryptimi
- Saugus užsegimo mechanizmas - plokštelės ir maišelio sujungimo metu yra girdimas spragtelėjimas
- Skirtingų spalvų plokštelės ir maišelio žiedai suteikia galimybę vizualiai įsitikinti rinktuvo sujungimo sandarumu
- Saugus ir paprastas naktinio šlapimo surinkėjo prijungimo prie urostominio maišelio mechanizmas
- Kilpelės, esančios maišelio žiedo šonuose, yra skirtos lengvam stomos diržo pritvirtinimui
- Maišelio dalis, kuri liečiasi prie kūno yra padengta švelnia ir vandeniui atsparia medžiaga



Nova 2

Urostominiai maišeliai

NOVA ² Urostomija	MAIŠELIS	MAIŠELIS
	NEPERMATOMI	PERMATOMAS
Žiedo dydis	REF kodas	REF kodas
36 mm	1217 - 36	1218 - 36
43 mm		1218 - 43
55 mm		1218 - 55 36 p.d.
Specifikacija		
Maišelio dydis (mm)	245 x 150	245 x 150
Talpa (ml)	330	330
Pakuotė	10 vnt.	10 vnt.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie produktus ar užsisakyti pavyzdžių, kreipkitės į Dansac produktų specialistus.

Nova™ 2 Lygios plokštelės

Šios plokštelės yra sukurtos lengvam ir paprastam naudojimui bei saugiam sukibimui su oda, tuo pačiu apsaugant peristominę odą.

Produkto savybės

- Saugi užsegimo sistema - maišelio ir plokštelės sujungimo metu yra girdimas spragtelėjimas
- Skirtingų spalvų plokštelės ir maišelio žiedai suteikia galimybę vizualiai įsitikinti rinktuvo sujungimo sandarumu
- Plokštelės žiedas yra pusiau fiksuotas - tai suteikia galimybę jam judėti laisvai bei prisitaikyti prie kūno linijų
- Plokštelė yra pagaminta iš GX™ hidrokoloido, todėl yra saugi odai bei itin lanksti
- Galima rinktis iš keturių plokštelių dydžių su įvairaus skersmens pradinėmis angomis
- Gali būti naudojamos su NovaLife™ ir Nova™ dviejų dalių rinktuvų maišeliais



Nova 2

Lygios plokštelės

NOVA
Skin Barrier

Žiedo dydis	Pradinė anga	Maksimalus iškirpimo skersmuo	REF kodas
● 36 mm 85 x 85 mm	15 mm (paruošta iškirpimui) 20 mm (iškirpta anga) 25 mm (iškirpta anga)	28 mm	1136 - 15 1136 - 20 1136 - 25
● 43 mm 100 x 100 mm	15 mm (paruošta iškirpimui) 30 mm (iškirpta anga)	35 mm	1143 - 15 1143 - 30
● 55 mm 100 x 100 mm	15 mm (paruošta iškirpimui) 35 mm (iškirpta anga)	47 mm	1155 - 15 1155 - 35
● 70 mm 115 x 115 mm	15 mm (paruošta iškirpimui)	62 mm	1170 - 15
Specifikacija			
Pakuotė			5 vnt.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie produktus ar užsisakyti pavyzdžių, kreipkitės į Dansac produktų specialistus.

Nova™ 2 Išgaubtos plokštelės

Šių plokštelių išgaubimo dėka yra suteikiamas atitinkamas slėgis apie įdubusią stomą, kuris padeda iškelti ją į pilvo paviršių. Produktas yra sukurtas lengvam ir paprastam naudojimui bei saugiam sukibimui su oda, tuo pačiu apsaugant ją nuo pažeidimų.

Produkto savybės

- 6 mm plokštelės išgaubimo gylis sukuria tinkamą jos prisitaikymą
- Galima rinktis iš trijų plokštelės išgaubimo diametrų, o tai suteikia galimybę išgauti optimaliausią plokštelės prispaudimą reikiamoje vietoje
- Plokštelė yra pagaminta iš GX™ hidrokoloido, todėl yra saugi odai
- Saugi užsegimo sistema - maišelio ir plokštelės sujungimo metu yra girdimas spragtelėjimas
- Skirtingų spalvų plokštelės ir maišelio žiedai suteikia galimybę vizualiai įsitikinti rinktuvo sujungimo sandarumu
- Plokštelė turi pakeliamą žiedą, kurio dėka, fiksuojant maišelį, nesukeliamas spaudimas į pilvo ertmę
- Galima rinktis iš keturių plokštelių dydžių su įvairaus skersmens pradinėmis angomis
- Šios plokštelės gali būti naudojamos su NovaLife™ ir Nova™ dviejų dalių rinktuvų maišeliais



Nova 2 Išgaubtos plokštelės

NOVA²
Convex Skin Barrier

Žiedo dydis	Pradinė anga	Maksimalus iškirpimo skersmuo	REF kodas
● 36 mm 100 x 100 mm	20 mm (iškirpta anga)	20 mm	1536 - 20
● 43 mm 100 x 100 mm	15 mm (paruošta iškirpimui) 25 mm (iškirpta anga) 30 mm (iškirpta anga)	30 mm 25 mm 30 mm	1543 - 15 1543 - 25 1543 - 30
● 55 mm 115 x 115 mm	15 mm (paruošta iškirpimui) 35 mm (iškirpta anga) 40 mm (iškirpta anga)	42 mm 35 mm 40 mm	1555 - 15 1555 - 35 1555 - 40
Specifikacija			
Išgaubimo gylis (mm)			6
Pakuotė			5 vnt.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie produktus ar užsisakyti pavyzdžių, kreipkitės į Dansac produktų specialistus.

“Visada sakau, kad aš sergu Krono liga, bet ją valdau aš, o ne ji mane. Tą patį galiu pasakyti ir apie savo stomą. Taip, aš turiu stomą, bet jūs tik pažvelkite į mane - aš toliau galiu gyventi normalų gyvenimą bei džiaugtis savimi.”



Jen, Krono herojė

Papildomos stomos priežiūros priemonės

Dansac GX-tra žiedai

Dansac Soft pasta

Dansac Medicininių klijų valiklis

Dansac Nodor S kvapo neutralizatorius

Dansac Lotion servetėlės

Stomos diržas

Žiedai ir kitos priemonės

Dansac GX-tra hidrokoloidinės masės žiedai

Angos dydis	REF kodas	Kiekis pakuotėje
30 mm	725 - 30/30	30
40 mm	725 - 40/30	30



Dansac GX-tra™ žiedai suteikia papildomą apsaugą nuo pratekėjimo. Norint tinkamai užpildyti odos nelygumus, raukšles ar randus, esančius aplink stomą ir taip sukurti lygų paviršių, žiedą galima ištempti arba sukarpyti atitinkamo dydžio gabalėliais.

Produkto savybės

- Žiedo storis - 2,5 mm
- Pagamintas iš GX hidrokoloido su medvilnės pluoštu. Ši priemonė padeda išvengti stomos turinio patekėjimo po plokštele, todėl gali prailginti rinktuvo dėvėjimo laiką
- Žiedas gali būti klijuojamas ant odos arba ant plokštelės
- Galima rinktis iš dviejų dydžių

Dansac Soft pasta

Kiekis	REF kodas
50.0 g	77550 - 0



Etilo alkoholis (31-32%), N-butilo alkoholis (3%), PVM/MA kopolimero butilo esteris, pektinas, polisorbateris 20, natrio karboksimetilceliuliozė, polietileno pluoštas, silicio dioksidas, alantoinas, metilparabenas, butilparabenas.

Dansac Soft pasta išlygina odos raukšles, randus ir kitus nelygumus, esančius aplink stomą ir užtikrina patikimą plokštelės sukibimą su oda.

Produkto savybės

- Padeda apsaugoti odą nuo stomos turinio pratekėjimo po plokštele
- Gali būti naudojama ant saunos odos arba ant plokštelės
- Esant poreikiui, pastą galima naudoti kartu su GX-tra hidrokoloidinės masės žiedais

Peristominės odos apsauga

Dansac Medicininių klijų valiklis

	REF kodas	Kiekis
EasiSpray	083 - 01	50 ml

Heksametildisiloksanas.



Dansac EasiSpray medicininių klijų valiklis yra silikono pagrindu pagamintas tirpalas, kuris padeda greitai, lengvai ir neskausmingai nuimti plokštelę bei pašalinti kitų stomos priežiūros priemonių likučius.

Produkto savybės

- Lengva naudoti – galima purkšti bet koku kampu
- Sudėtyje nėra alkoholio, todėl nedirgina net jautrios odos
- Bag-in-can technologija užtikrina visišką produkto sunaudojimą

Dansac Nodor S kvapo neutralizatorius

Kiekis	REF kodas
50 ml	080 - 00



Aliuminio sulfatas, cinko sulfatas, išgrynintas vanduo.

Dansac Nodor S kvapo neutralizatorius yra naudojamas, siekiant sumažinti nemalonaus kvapo riziką keičiant arba ištuštinant maišelį.

Produkto savybės

- Naudojamas kvapo neutralizavimui maišelio viduje
- Sudėtyje yra aliuminio ir cinko druskų
- Bekvapis

Peristominės odos priežiūra

Dansac Skin Lotion valomosios servetėlės

	REF kodas	Kiekis pakuotėje
Servetėlės	71000 - 0000	50



Dansac losjonas ir Skin Lotion servetėlės

Vanduo, etilo alkoholis, sėmenų aliejus, kalio hidroksidas, kokoso rūgštis, kvepalai, propilgalatas, druskos rūgštis.

Dansac Skin Lotion servetėlės yra skirtos peristominės odos valymui, nenaudojant vandens.

Produkto savybės

- Kiekviena drėgna servetėlė yra individualioje pakuotėje

Stomos diržas

Aprašymas	REF kodas	Kiekis pakuotėje
Diržas 100 cm (kūno spalvos)	090 - 02	1 vnt.



Norėdami gauti daugiau informacijos apie produktus ar užsisakyti pavyzdžių, kreipkitės į Dansac produktų specialistus.

[illegible]

Jaustis patogiai savo nuosavame kūne

Daugiau informacijos apie stomos priežiūros priemones:

Gintarė Meidutė

Dansac produktų specialistė

Kaunas

Mobilus +370 618 06090

Gintare.Meidute@onemed.com

Jūratė Kazlauskaitė

Dansac produktų specialistė

Vilnius

Mobilus +370 611 17999

Jurate.Kazlauskaite@onemed.com

www.dansac.com

 www.facebook.com/dansacostomy

Prieš naudodami būtinai perskaitykite instrukcijas, kad būtumėte informuoti apie numatytą naudojimą, kontraindikacijas, įspėjimus, atsargumo priemones ir kitas instrukcijas.

Dansac logotipas, EasiView, Nodor S, Nova, NovaLife ir TRE
yra Dansac A/S prekių ženklai. © 2021 Dansac A/S



dansac 
Dedicated to Stoma Care

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Valid to: 09-11-2022

DANSAC A/S hereby declares that the company fulfils the obligations concerning the required technical documentation and declares that the products comply with the requirements in the Council Directive of June 14th, 1993 concerning medical devices, (MDD 93/42) and the Danish Medicines Agency Decree no. 1263 of December 15, 2008.

The declaration applies for the following ostomy product in Class I (unsterile):

DANSAC NOVALIFE OPEN 1&2

Dansac NovaLife Open 1 is a 1-piece product consisting of a ostomy collection pouch with a skin protecting barrier.

Dansac NovaLife Open 2 is a 2-piece product consisting of a ostomy collection pouch and a wafer with a skin protecting barrier.

The device is designed for Ostomates.

Date: **09-11-2020**

Signature:



Inge Mygind Aagaard
Manager Quality Assurance
DANSAC A/S
Lille Kongevej 304
DK – 3480 Fredensborg

The Dansac NovaLife Open 1&2 range consists of several variants (Ref. and Product Name are listed in the following document): **FR-EVI3788, FR-DVI2365, FR-DVI2367, FR-DVI2368, FR-DVI3291, FR-DVI3292 and FR-DVI3293.**

The Pouch:

- Mini or Midi or Maxi
- Opaque or Clear
- Opaque with Viewing Option

The Wafer:

- Regular Wafer