

# Vasofix® Safety

Izoliuotas intraveninis kateteris su anga injekcijoms

# Vasofix® Braunüle®

# Vasofix® Certo

Intraveniniai kateteriai su anga injekcijoms



Arteriovenin jungtis

Apsaugo Jus ir Jūsų sveikatos priežiūros komandą nuo mikrotraumų injekcine adata ir su tuo susijusi infekcijų.

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

# Apsauga nuo sidrimo adata, kuri aktyvinasi savaime ...


Dabar viskas gerai.

*"Laukimas buvo kankinantis ..."*

Visi esame girdę įgudinamą pasakojimą apie tai, kaip sveikatos priežiūros personalas užsikrėtęs potencialiai mirtinomis ligomis. Kuo greičiau reikia veikti, tuo didesnė sidrimo adata tikimybė. Greitosios pagalbos automobiliui važiuojant per duobes arba pacientui išsigandus, kraujo kupina adata išslysta ir kam nors duria. Tuomet prasideda laukimo nerimas ir nežinia, ar infekcinių tyrimų, pvz., hepatito A, B ar C arba ŽIV, rezultatai bus teigiami.

Daug metų egzistuoja didelis geresnių adatų apsaugos sistemų poreikis. Mes, „B. Braun“, atsižvelgdami į šį poreikį, siūlome „Vasofix® Safety“ – izoliuotą intraveninį kateterį su anga injekcijoms. Specialiai sukurtas spaustukas pats aktyvuoja aštrią adatą, padarydamas nekenksmingą iškart, kai tik ji ištraukiama iš venos. „Vasofix® Safety“ sumažina mikrotraumą injekcine adata pavoje, kai krauju plintantys virusai yra labiausiai aktyvūs.

Naujasis dizainas apsaugo nuo mikrotraumų injekcine adata ir atsitiktinio infekcijos perdavimo.

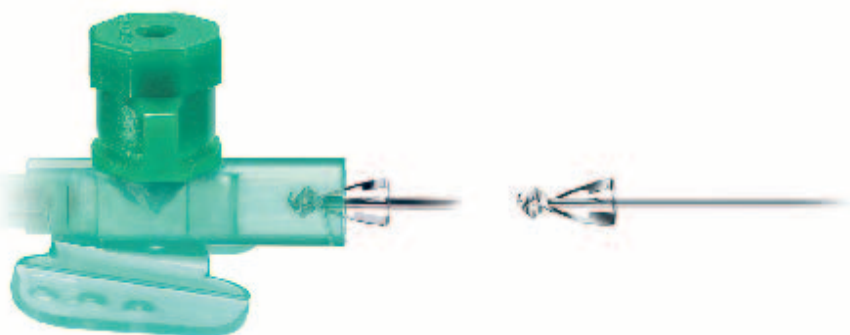

skal 2:1



# ... prastos naudojimo ypatybės

Arterin -venin jungtis

## Naudojama kaip prasta

Su naujuoju „Vasofix® Safety“ naudojama ta pati punkcijos technika kaip ir su prastu „Vasofix®“ intraveniniu kateteriu. Nėra jokių naudojimo pokyčių. Tai reiškia, kad nereikia mokyti personalo, be to, poveikis klinicinei praktikai yra minimalus. Tai taip pat turi teigiamos takos esant ribotam biudžetui ir palengvina apsisprendimą šį gaminį sigyti.

## Saugumo ypatybės

- Spaustuko, kuris pats aktyvuojasi, technologija. Naudotojui nereikia jo aktyvuoti
- Nėra netiesinio aktyvavimo rizikos
- Saugumo mechanizmo negalima išvengti
- Panaudojus adatą, apsauginis spaustukas iškart uždengia jos galiuką
- Ta pati punkcijos technika kaip ir naudojant prastus intraveninius kateterius
- Higienišką vaistų sušvirkštimą be papildomų adatų ar sidrėnimo rizikos



## Dvigubas sugrąžinimas

Gera permatoma laikymo dalis su hidroforiniu, nepraleidžiančiu skysčio kraujo stabdikliu ir permatomais kateterio segmentais leidžia patikimai nustatyti kateterio padėtį šiek tiek ištraukiant adatą.



## Kateteris nustatomas jonizuojančia spinduliuote

Ketrios visiškai terptos rentgeno kontrastinės linijos permatomame kateteryje padeda pamatyti netiesiai nukirptą kateterį arba nustatyti kateterio dalies užsikimšimą. Mažiau komplikacijų tikimybė ir sipareigojimai ligoninei.



## Punkcijos ypatumai

Dėl elektra poliruoto, aštraus, nuožulniai nupjauto ir kūgio formos smailios atraumatinio kateterio galo nereikia daug įgulos punktuojant, be to, tai nesukelia beveik jokio skausmo pacientui.



## Anga injekcijoms

Greitos ir paprastos injekcijos leidžia greičiau pradėti leisti vaistus be papildomo džiovinimo.

Vasofix® Safety – Sukurtas saugumui.




# Gamini asortimentas












## Arteriovenin jungtis

Vasofix®  
Safety



Gaminio tipas	Dydis	Kateterio Ilgis/coliais	Ø/mm	T km s greitis ml/min	Referencinis numeris Vasofix® Safety	Referencinis numeris Adata/laikiklis	
					Kateterio medžiaga		
					FEP	PUR	
	24G	3/4	0,7 x 19	22	-	4269071S	-
	22G	1	0,9 x 25	36	4268091S	4269098S	4215095
	20G	1	1,1 x 25	65	-	4269217S	4215117
	20G	1 1/4	1,1 x 33	61	4268113S	4269110S	4219104
	18G	1 1/4	1,3 x 33	103	4268334S	4269330S	4219139
	18G	1 3/4	1,3 x 50	96	4268130S	4269136S	4219120
	17G	1 3/4	1,5 x 50	128	4268156S	4269152S	4215150
	16G	2	1,7 x 50	196	4268172S	4269179S	4219171
14G	2	2,2 x 50	343	4268210S	4269225S	219201	
Pardavimo vienetai: 200 pak. (4 x 50 pak.)						ISO 10555-1/5	

## Vasofix® Braunüle® / Vasofix® Certo

	Product Type		Dydis	Kateterio Ilgis/coliais ø/mm	T km s greitis ml/min	Referencinis numeris Vasofix® Braunüle® Vasofix® Certo		Referencinis numeris Adata/laikiklis
						Kateterio medžiaga		
						FEP	PUR	
		24G	3/4	0,7 x 19	22	-	4269071	-
		22G	1	0,9 x 25	36	4268091B	4269098	4215095
		20G	1	1,1 x 25	65	-	4269217	4215117
		20G	1 1/4	1,1 x 33	61	4268113B	4269110	4219104
		18G	1 1/4	1,3 x 33	103	4268334B	4269330	4219139
		18G	1 3/4	1,3 x 50	96	4268130B	4269136	4219120
		17G	1 3/4	1,5 x 50	128	4268156B	4269152	4215150
	16G	2	1,7 x 50	196	4268172B	4269179	4219171	
	14G	2	2,2 x 50	343	4268210B	4269225	4219201	
Pardavimo vienetai: 200 pak. (4 x 50 pak.)								ISO 10555-1/5

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

B. Braun Melsungen AG

P.O. Box 1120  
D-34209 Melsungen  
Tel +49(0) 56 61 71-0

www.bbraun.com