

# Vasofix® Safety

Izoliuotas intraveninis kateteris su anga injekcijoms

# Vasofix® Braunüle®

# Vasofix® Certo

Intraveniniai kateteriai su anga injekcijoms



Apsaugo Jus ir Jūsų sveikatos priežiūros komandą nuo mikrotraumų injekcine adata ir su tuo susijusių infekcijų.

# Apsauga nuo įsidūrimų adata, kuri aktyvinasi savaime ...


Dabar viskas gerai.

*"Laukimas buvo kankinantis..."*

Visi esame girdėję gąsdinamų pasakojimų apie tai, kaip sveikatos priežiūros personalas užsikrėtė potencialiai mirtinomis ligomis. Kuo greičiau reikia veikti, tuo didesnė įsidūrimo adata tikimybė. Greitosios pagalbos automobiliui važiuojant per duobes arba pacientui išsigandus, kraujo kupina adata išslysta ir kam nors įduria. Tuomet prasideda laukimo nerimas ir nežinia, ar infekcinių tyrimų, pvz., hepatito A, B ar C arba ŽIV, rezultatai bus teigiami.

Daug metų egzistuoja didelis geresnių adatų apsaugos sistemų poreikis. Mes, „B. Braun“, atsižvelgdami į šį poreikį, siūlome „Vasofix® Safety“ – izoliuotą intraveninę kateterį su anga injekcijoms. Specialiai sukurtas spaustukas pats aktyvuoja aštrų adatos galą padarydamas nekenksmingą iškart, kai tik ji ištraukiama iš venos. „Vasofix® Safety“ sumažina mikrotraumų injekcine adata pavojų, kai krauju plintantys virusai yra labiausiai aktyvūs.

Naujasis dizainas apsaugo nuo mikrotraumų injekcine adata ir atsitiktinio infekcijos perdavimo.

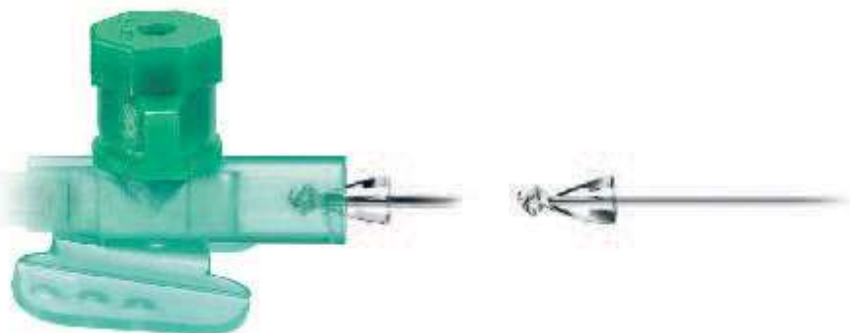

skalė 2 : 1



# ...įprastos naudojimo ypatybės

Arterinė-veninė jungtis

## Naudojama kaip įprasta

Su naujuoju „Vasofix® Safety“ naudojama ta pati punkcijos technika kaip ir su įprastu „Vasofix“® intraveniniu kateteriu. Nėra jokių naudojimo pokyčių. Tai reiškia, kad nereikia mokyti personalo, be to, poveikis klinicinei praktikai yra minimalus. Tai taip pat turi teigiamos įtakos esant ribotam biudžetui ir palengvina apsisprendimą šį gaminį įsigyti.

## Saugumo ypatybės

- Spaustuko, kuris pats aktyvuojasi, technologija. Naudotojui nereikia jo aktyvuoti
- Nėra netyčinio aktyvavimo rizikos
- Saugumo mechanizmo negalima išvengti
- Panaudojus adatą, apsauginis spaustukas iškart uždengia jos galiuką
- Ta pati punkcijos technika kaip ir naudojant įprastus intraveninius kateterius
- Higienišką vaistų sušvirkštimą be papildomų adatų ar įsidūrimo rizikos



## Dvigubas sugrąžinimas

Gera permatoma laikymo dalis su hidrofobiniu, nepraleidžiančiu skysčio kraujo stabdikliu ir permatomais kateterio segmentais leidžia patikimai nustatyti kateterio padėtį tiek tiek ištraukiant adatą.



## Kateteris nustatomas jonizuojančiąja spinduliuote

Ketrios visiškai įterptos rentgeno kontrastinės linijos permatomame kateteryje padeda pamatyti netyčia nukirptą kateterį arba nustatyti kateterio dalies užsikimšimą. Mažėja komplikacijų tikimybė ir įsipareigojimai ligoninei.



## Punkcijos ypatumai

Dėl elektra poliruoto, aštraus, nuožulniai nupjauto ir kūgio formos smailėjančio atraumatinio kateterio galo nereikia daug jėgos punktuojant, be to, tai nesukelia beveik jokio skausmo pacientui.



## Anga injekcijoms

Greitos ir paprastos injekcijos leidžia greičiau pradėti leisti vaistus be papildomo dūrio.


Vasofix® Safety – Sukurtas saugumui.




# Gaminių asortimentas

## Arterioveninė jungtis



Gaminio tipas	Dydis	Kateterio Ilgis/coliais	Ø/mm	Tėkmės greitis ml/min	Referencinis numeris Vasofix® Safety		Referencinis numeris Adata/laikiklis
					Kateterio medžiaga		
					FEP	PUR	
	24G	3/4	0,7 x 19	22	-	4269071S	-
	22G	1	0,9 x 25	36	4268091S	4269098S	4215095
	20G	1	1,1 x 25	65	-	4269217S	4215117
	20G	1 1/4	1,1 x 33	61	4268113S	4269110S	4219104
	18G	1 1/4	1,3 x 33	103	4268334S	4269330S	4219139
	18G	1 3/4	1,3 x • 5	96	4268130S	4269136S	4219120
	17G	1 3/4	1,5 x • 5	128	4268156S	4269152S	4215150
	16G	2	1,7 x 50	196	4268172S	4269179S	4219171
	14G	2	2,2 x 50	343	4268210S	4269225S	219201
Pardavimo vienetai: 200 pak. (4 x 50 pak.)							ISO 10555-1/5

## Vasofix® Braunüle® / Vasofix® Certo

Product Type	Dydis	Kateterio Ilgis/coliais	Ø/mm	Tėkmės greitis ml/min	Referencinis numeris Vasofix® Braunüle® Vasofix® Certo		Referencinis numeris Adata/laikiklis
					Kateterio medžiaga		
					FEP	PUR	
	24G	3/4	0,7 x 19	22	-	4269071	-
	22G	1	0,9 x 25	36	4268091B	4269098	4215095
	20G	1	1,1 x 25	65	-	4269217	4215117
	20G	1 1/4	1,1 x 33	61	4268113B	4269110	4219104
	18G	1 1/4	1,3 x 33	103	4268334B	4269330	4219139
	18G	1 3/4	1,3 x • 5	96	4268130B	4269136	4219120
	17G	1 3/4	1,5 x • 5	128	4268156B	4269152	4215150
	16G	2	1,7 x 50	196	4268172B	4269179	4219171
	14G	2	2,2 x 50	343	4268210B	4269225	4219201
Pardavimo vienetai: 200 pak. (4 x 50 pak.)							ISO 10555-1/5

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

B. Braun Melsungen AG

P.O. Box 1120  
D-34209 Melsungen  
Tel +49(0) 56 61 71-0

www.bbraun.com